



# Leitfaden für den Verbandwechsel

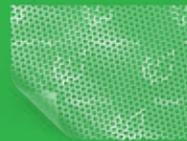


Nutzen Sie **Mepitel® One** für die Behandlung Ihrer Wunde.

## Anwendung:

1. Wunde gemäß geltender Richtlinien reinigen und vorbereiten. Wundumgebende Haut gründlich trocknen.
2. Entnehmen Sie den Verband der Verpackung.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie mit der Markierung „1“.

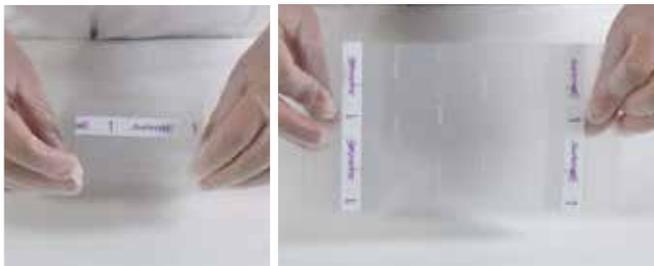

4. Applizieren Sie die haftende Seite auf der Wunde.

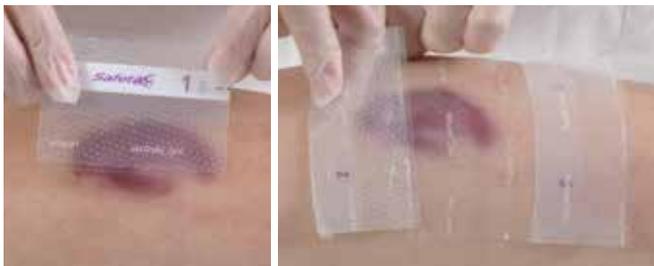

5. Entfernen Sie die Schutzfolie(n) mit der Markierung „2“ und streichen Sie den Verband auf der wundumgebenden Haut glatt, um eine gute Abdichtung zu erzielen.

### Bitte beachten Sie:

- ✓ Mepitel® One ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht wiederverwendet werden.

6. Decken Sie Mepitel® One mit einem äußeren Verband ab.



7. Legen Sie einen Schlauchverband an, um den Verband zu fixieren.



## Wann sollte der Verband gewechselt werden?

Ihre Pflegekraft empfiehlt Ihnen einen Verbandwechsel, wenn...

---

Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?  
Bitte kontaktieren Sie Ihre Pflegekraft:

---

Auf unserer Webseite zeigen wir Ihnen in einem kurzen Video, wie Sie den Verband anlegen können. Scannen Sie hierfür einfach den Code mit Ihrem Handy oder besuchen Sie uns auf:



[www.molnlycke.de/produkte-losungen/mepitel-one](http://www.molnlycke.de/produkte-losungen/mepitel-one)

Mepitel® One Wundverbände sollten grundsätzlich von medizinischem Fachpersonal angewendet werden. Falls kein medizinisches Fachpersonal verfügbar ist, kann es notwendig sein, dass ein Familienmitglied oder Sie selbst den Verbandwechsel durchführen müssen. In diesem Fall übernimmt der Hersteller keine Verantwortung oder Haftung bzgl. der Anwendung des Verbandes. Entsprechend geschieht die Anwendung von Mepitel® One, wenn diese nicht von einer medizinischen Fachkraft umgesetzt wird, auf eigene Gefahr.

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Telefon: 0211 92088-0. Mölnlycke®, Mepilex® Border Flex sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0109

  
**Mölnlycke®**