


WELCHER VERBAND FÜR WELCHE WUNDE?

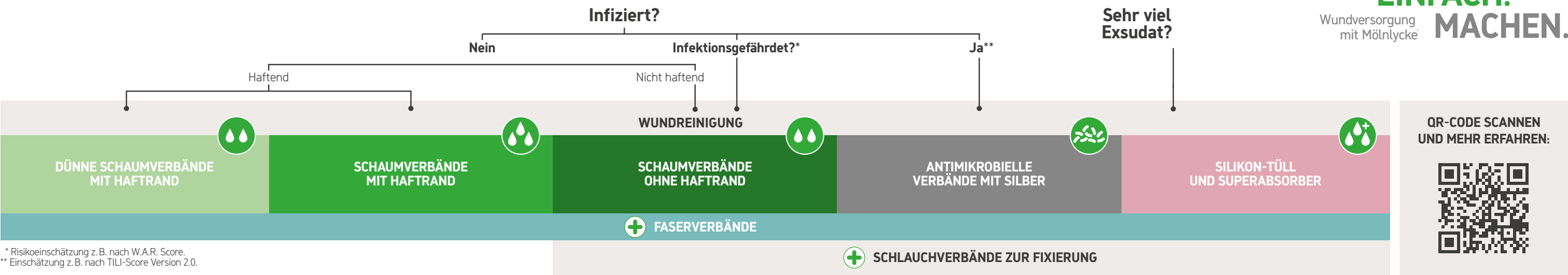

* Risikoeinschätzung z.B. nach W.A.R. Score.
** Einschätzung z.B. nach TILI-Score Version 2.0.

EINFACH.
MACHEN.

PHASENGERECHTE WUNDVERSORGUNG

	Inflammationsphase/Reinigungsphase			Granulationsphase		Epithelisierungsphase	Maturationsphase					
Wundart/ Wundzustand	Trockene, fibrinbelegte Wunden; frei- liegende empfindliche Strukturen: z.B. Sehnen; Wunden mit schwacher Exsudation			Infektionsgefährdete oder infizierte oberflächliche Wunden		Infektionsgefährdete oder infizierte Wundhöhlen	Feuchte (oberflächliche) Wunden	Feuchte Wundhöhlen	Schwach exsudierende, epithelisierende Wunden	Gewebsstabilisierung		
Beispiel												
Exsudation	Nicht bis wenig			Mäßig bis stark bis		Wenig bis mittel bis		Nicht bis wenig				
Ziele	• Aufweichen der Beläge • Wundreinigung • Feuchthalten			• Keimreduzierung • Wundreinigung • Exsudatmanagement • Wundrandschutz		• Erhaltung eines feuchtwarmen Wundmilieus • Exsudatmanagement • Schutz		• Schutz • Wundruhe		• Schutz • Förderung der Elastizität • Vorbeugung hypertropher Narbenbildung		
Schmerzen minimieren												
Wundreinigung	Je nach Wundheilungsphase und individueller Wundsituation: geeignete Reinigungsmethode und Wundspüllösung / ggf. Antiseptikum und/oder Débridement									Empfehlung: Granudacyn® Wundspüllösung		
Sauerstoff- Therapie	Wunden, deren Reduktion der Wundgröße innerhalb von 4 Wochen weniger als 40 % beträgt: zusätzliche Verabreichung von Granulox®											
Primärverband/ Wundfüller	 Granudacyn® Wundgel		 Granudacyn® Wundgel		 Exufiber® + Granudacyn® Wundgel		bei Bedarf Granudacyn® Wundgel		 Exufiber® + bei Bedarf Granudacyn® Wundgel		 Mepilex® Lite + Tubifast®	 Mepitel® Film Mepiform®
Alternativ bei infektionsgefährdeter o. infizierter Wunde	Antiseptikum und / oder Débridement											
	 Mepilex® Ag oder Mepilex® Transfer Ag oder Mepilex® Border Ag				 Exufiber® Ag+ oder Melgisorb® Ag							
Sekundärverband	 Mepilex® Lite	 Mepilex® Border Flex Lite	 Mepilex® XT Mepilex®	 + Mextra®	 Mepilex® Border Flex oder Mepilex® XT Mepilex®				 Mepilex® Border Flex Lite oder Mepitel® Film			
Fixierung	 + Tubifast®											

LÖSUNGEN FÜR SPEZIELLE SITUATIONEN

SEHR STARK EXSUDIERENDE WUNDEN (PALLIATIVE WUNDEN)			VERBRENNUNGEN BIS GRAD 2A		CHIRURGISCHE WUNDEN	STRAHLENBEDINGTE HAUTREAKTIONEN	SKIN TEARS	NARBENBEHANDLUNG
 Mepitel® One	 Mepitel®	 Mepilex® Transfer	 Mepitel® One Granudacyn® Wundgel Mextra® Superabsorbent		 Mepilex® Ag	 Mepilex® Border Post-OP	 Mepilex® Lite	 Mepitel® One
 + Mextra® Superabsorbent			 + Tubifast®		 Mepitel® Film	 Mepitel® Film		 Mepiform®
 + Tubifast®								
 Avance® Solo			 Einweg-Unterdruck-Wundtherapie- system zur Entfernung von Exsudat aus chirurgischen (ciNPT), akuten und chronischen Wunden (dNPWT)		 Batteriebetriebenes System mit einem kontinuierlichen Unterdruck von -125 mmHg und einer Lebensdauer von 14 Tagen			

SCHAUMVERBÄNDE MIT HAFTRAND

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton	
Mepilex® Border Flex				
59 52 50	7,5 x 7,5 cm	5	50	eckig
59 53 50	10 x 10 cm	5	50	
59 50 50	12,5 x 12,5 cm	5	50	
59 54 11	15 x 15 cm	10	100	
59 56 11	15 x 20 cm	10	120	
59 58 00	10 x 20 cm	10	30	oval
59 59 00	10 x 30 cm	10	40	
58 35 00	7,8 x 10 cm	5	50	
58 33 00	13 x 16 cm	5	35	
58 34 00	15 x 19 cm	5	45	

Mepilex® Border Flex Lite				
58 10 50	4 x 5 cm	10	70	
58 11 00	5 x 12,5 cm	5	65	
58 12 50	7,5 x 7,5 cm	5	70	
58 13 50	10 x 10 cm	5	50	
58 15 00	15 x 15 cm	5	50	

Mepilex® Border Sacrum				
28 20 60	16 x 20 cm	5	25	
28 24 60	22 x 25 cm	5	25	

Mepilex® Border Heel				
28 27 10	22 x 23 cm	10	30	

SCHAUMVERBÄNDE

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton	
Mepilex® XT				
21 10 15	5 x 5 cm	5	40	
21 11 10	12,5 x 12,5 cm	5	50	
21 12 10	10 x 21 cm	5	45	
21 13 10	17,5 x 17,5 cm	5	25	
21 14 10	21 x 22 cm	5	20	
21 15 00	20 x 50 cm	2	12	

Mepilex®				
29 40 15	5 x 5 cm	5	40	
29 41 00	10 x 10 cm	5	70	
29 42 00	10 x 20 cm	5	45	
29 43 00	15 x 15 cm	5	25	
29 44 00	20 x 20 cm	5	20	
29 45 00	20 x 50 cm	2	12	

Mepilex® Heel				
28 81 00	13 x 20 cm	5	25	

Mepilex® Lite				
28 40 00	6 x 8,5 cm	5	70	
28 41 00	10 x 10 cm	5	50	
28 43 00	15 x 15 cm	5	30	
28 45 00	20 x 50 cm	4	24	

Mepilex® Transfer				
29 47 00	10 x 12 cm	5	50	
29 48 00	15 x 20 cm	5	40	
29 45 02	20 x 50 cm	4	24	

FOLIENVERBÄNDE

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton	
Mepitel® Film				
29 61 70	6 x 7 cm	10	50	
29 62 70	10 x 12 cm	10	70	
29 64 70	10 x 25 cm	10	50	
29 66 70	15 x 20 cm	10	70	

ANTIMIKROBIELLE SCHAUMVERBÄNDE

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton	
Mepilex® Ag				
28 71 10	10 x 10 cm	5	70	
28 72 10	10 x 20 cm	5	45	
28 73 10	15 x 15 cm	5	25	
28 74 10	20 x 20 cm	5	20	
28 75 10	20 x 50 cm	2	12	

Mepilex® Heel Ag				
38 81 00	13 x 20 cm	5	25	
38 83 00	15 x 22 cm	5	30	

Mepilex® Border Ag				
39 52 60	7 x 7,5 cm	5	70	
39 53 60	10 x 12,5 cm	5	50	
39 54 60	15 x 17,5 cm	5	35	
39 56 60	17 x 20 cm	5	40	
39 58 00	10 x 20 cm	5	35	
39 57 00	10 x 25 cm	5	35	
39 59 00	10 x 30 cm	5	25	

Mepilex® Border Sacrum Ag				
38 20 00	18 x 18 cm	5	40	
38 22 00	20 x 20 cm	5	40	
38 24 00	23 x 23 cm	5	25	

Mepilex® Transfer Ag				
39 40 00	7,5 x 8,5 cm	10	70	
39 47 00	12,5 x 12,5 cm	5	50	
39 48 00	15 x 20 cm	10	50	
39 45 00	20 x 50 cm	2	12	

CHIRURGISCHE WUNDVERSORGUNG

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton	
Mepilex® Border Post-Op				
49 61 00	6 x 8 cm	10	100	
49 62 00	9 x 10 cm	10	100	
49 63 00	10 x 15 cm	10	100	
49 64 00	10 x 20 cm	10	30	
49 64 50	10 x 25 cm	10	80	
49 66 00	10 x 30 cm	10	40	
49 66 50	10 x 35 cm	5	50	

WUNDDISTANZGITTER / SILIKON-TÜLL

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton	
Mepitel®				
29 05 10	5 x 7,5 cm	10	50	
29 07 10	7,5 x 10 cm	10	40	
29 10 10	10 x 18 cm	10	70	
29 20 05	20 x 30 cm	5	30	

Mepitel® One				
Mit Abziehhilfe				
28 91 00	5 x 7,5 cm	10	70	
28 91 70	6 x 7 cm	5	70	
Ohne Abziehhilfe				
28 93 00	7,5 x 10 cm	10	40	
28 92 70	9 x 10 cm	5	50	
28 95 00	10 x 18 cm	10	70	
28 94 70	13 x 15 cm	5	50	
28 97 00	17 x 25 cm	5	40	
28 97 50	27,5 x 50 cm	2	14	

Sofern nicht anders aufgeführt, sind alle Produkte einzeln steril verpackt.

FIXIERUNG

Art.-Nr.	Breite	Umfang Gliedermaße	Stück/ Karton	
Tubifast®				
24 34	Rot (3,5 cm)	9–18 cm	1	
24 36	Grün (5 cm)	14–24 cm	1	
24 38	Blau (7,5 cm)	24–40 cm	1	
24 40	Gelb (10,75 cm)	35–64 cm	1	
24 44	Violett (20 cm)	64–130 cm	1	

GELBILDENDER FASERVERBAND

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton	
Exufiber®				
70 99 00	5 x 5 cm	10	40	
70 99 01	10 x 10 cm	10	80	
70 99 03	15 x 15 cm	10	60	
70 99 04	20 x 30 cm	5	25	
70 99 05	4,5 x 10 cm	10	40	
70 99 06	4,5 x 20 cm	10	50	
70 99 07	4,5 x 30 cm	10	60	
Tamponaden				
70 99 08	1 x 45 cm	5	25	
70 99 09	2 x 45 cm	5	25	

Exufiber® Ag+				
60 34 01	5 x 5 cm	10	40	
60 34 02	10 x 10 cm	10	60	
60 34 03	15 x 15 cm	10	60	
60 34 04	4,5 x 10 cm	10	40	
60 34 05	4,5 x 20 cm	10	50	
60 34 06	4,5 x 30 cm	10	60	
60 34 07	20 x 30 cm	5	20	
Tamponade				
60 34 00	2 x 45 cm	5	20	

UNTERDRUCK-WUNDTHERAPIE

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Stück/ Packung	Stück/ Karton	
Avance® Solo				
888 00 50	Avance® Solo Pumpe / Starter Set	1	2	
88 10 20	Avance® Solo Wundverband 10 x 20 cm	2	4	
88 10 30	Avance® Solo Wundverband 10 x 30 cm	2	4	
88 10 35	Avance® Solo Wundverband 10 x 35 cm	2	4	
88 15 15	Avance® Solo Wundverband 15 x 15 cm	2	4	
88 15 20	Avance® Solo Wundverband 15 x 20 cm	2	4	
88 15 30	Avance® Solo Wundverband 15 x 30 cm	2	4	
88 20 20	Avance® Solo Wundverband 20 x 20 cm	2	4	
88 25 25	Avance® Solo Wundverband 25 x 25 cm	2	4	
88 20 00	Avance® Solo / Adapt Wundfüller	4	8	
88 00 50	Avance® Solo / Adapt Kanister (50 ml)	4	8	
Set	888 10 20 Avance® Solo Set: Pumpe inkl. Wundverband 10 x 20 cm – ciNPT	1	2	
	888 10 30 Avance® Solo Set: Pumpe inkl. Wundverband 10 x 30 cm – ciNPT	1	2	
	888 10 35 Avance® Solo Set: Pumpe inkl. Wundverband 10 x 35 cm – ciNPT	1	2	
999 41 52	Avance® Solo Adapt Set: Pumpe inkl. Filmverband u. Wundfüller – dNPWT	1	2	
99 41 52	Avance® Solo Adapt Filmverbandset 20 x 27 cm – dNPWT	5	5	
99 40 00	Avance® Solo Adapt Filmverband 20 x 27 cm – dNPWT	5	10	

NARBENBEHANDLUNG

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton	
Mepiform®				
29 36 00	4 x 30 cm	5	50	
29 37 00	5 x 7,5 cm	5	25	
29 38 00	10 x 18 cm	5	35	

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de
Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf,
Tel. +49 211 920 88-0, Fax +49 211 920 88-170
Der Name Mölnlycke Health Care und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2024 Mölnlycke Health Care AB.
Alle Rechte vorbehalten.
DWC0090

Stand: September 2024



SUPERABSORBER

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton	
Mextra® Superabsorbent				
61 07 00	10 x 10 cm	10	50	
61 07 10	10 x 15 cm	10	40	
61 07 20	10 x 20 cm	10	90	
61 07 30	15 x 20 cm	10	40	
61 07 40	20 x 25 cm	10	40	
61 07 50	20 x 30 cm	10	50	
61 07 60	20 x 40 cm	10	50	

ALGINATE

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton	
Melgisorb® Plus®				
25 20 00	5 x 5 cm	10	100	
25 22 00	10 x 10 cm	10	100	
25 25 00	10 x 20 cm	10	100	
Tamponade				
25 35 00	3 x 45 cm	5	50	

Melgisorb® Ag				
25 60 55	5 x 5 cm	10	100	
25 61 05	10 x 10 cm	10	100	
25 61 55	15 x 15 cm	10	100	
Tamponade				
25 66 05	3 x 44 cm	10	100	

SAUERSTOFF-THERAPIE

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung	
Granulox® Hämoglobin-Spray®				
360001	12 ml / ca. 30 Anwendungen	09 50 57 53	6	

Wundreinigung				
Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe	Stück/ Karton	

Granudacyn® Wundspüllösung und Gel®				
36 01 50	Wundspüllösung 50 ml	50 ml	20	
36 01 00	Wundspüllösung 250 ml	250 ml	15	
36 01 01	Wundspüllösung 500 ml	500 ml	12	
36 01 02	Wundspüllösung 1000 ml	1000 ml	6	
36 01 03	Wundspüllösung NPWT 500 ml	500 ml	12	
36 01 04	Wundspüllösung NPWT 1000 ml	1000 ml	6	
36 01 07	Wundgel 50 g	50 g	12	
36 01 08	Wundgel 100 g	100 g	12	
36 01 06	Wundgel 250 g	250 g	15	

WUNDVERSORGUNG

