


Leitfaden für den Verbandwechsel

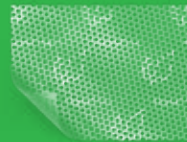

Nutzen Sie **Mepitel® One** für die Behandlung Ihrer Wunde.

Anwendung:

1. Wunde gemäß geltender Richtlinien reinigen und vorbereiten. Wundumgebende Haut gründlich trocknen.
2. Entnehmen Sie den Verband der Verpackung.
3. Entfernen Sie die Schutzfolie mit der Markierung „1“.



4. Applizieren Sie die haftende Seite auf der Wunde. Achten Sie darauf, dass Sie die Wundauflage in Richtung des Hautrislappens auftragen, beginnend von unten.



5. Entfernen Sie die Schutzfolie(n) mit der Markierung „2“ und streichen Sie den Verband auf der wundumgebenden Haut glatt, um eine gute Abdichtung zu erzielen.

Bitte beachten Sie:

- ✓ Stellen Sie sicher, dass Sie den Verband in die Richtung ablösen, die auf der Wundauflage angegeben ist.
- ✓ Mepitel One® ist nur für den einmaligen Gebrauch bestimmt und darf nicht wiederverwendet werden.

6. Decken Sie Mepitel One® mit äußeren Verband ab.



7. Belassen Sie den Verband gemäß den Anweisungen Ihrer Pflegekraft auf der Wunde.



Wann sollte der Verband gewechselt werden?

Ihre Pflegekraft empfiehlt Ihnen einen Verbandwechsel, wenn...

Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen?
Bitte kontaktieren Sie Ihre Pflegekraft:

Auf unserer Webseite zeigen wir Ihnen in einem kurzen Video, wie Sie den Verband anlegen können. Scannen Sie hierfür einfach den Code mit Ihrem Handy oder besuchen Sie uns auf:



www.molnlycke.de/wundtypen/skin-tears

Mepitel® One Wundverbände sollten grundsätzlich von medizinischem Fachpersonal angewendet werden. Falls kein medizinisches Fachpersonal verfügbar ist, kann es notwendig sein, dass ein Familienmitglied oder Sie selbst den Verbandwechsel durchführen müssen. In diesem Fall übernimmt der Hersteller keine Verantwortung oder Haftung bzgl. der Anwendung des Verbandes. Entsprechend geschieht die Anwendung von Mepitel® One, wenn diese nicht von einer medizinischen Fachkraft umgesetzt wird, auf eigene Gefahr.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Molnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Telefon: 0211 92088-0. Molnlycke®, Mepitel® Border Flex sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Molnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2020 Molnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0108


Molnlycke®