

Phasengerechte Wundversorgung

	Inflammationsphase / Reinigungsphase			Granulationsphase		Epithelisierungsphase	Maturationsphase															
Wundart/ Wundzustand	Trockene, fibrinbelagte Wunden; freiliegende empfindliche Strukturen: z. B. Sehnen; Wunden mit schwacher Exsudation			infektionsgefährdete oder infizierte, oberflächliche Wunden		infektionsgefährdete oder infizierte Wundhöhlen		Feuchte (oberflächliche) Wunden		(Feuchte) Wundhöhlen		Schwach exsudierende, epithelisierende Wunden		Gewebsstabilisierung								
Beispiel																						
Exsudation	Nicht bis wenig 🟩			Mäßig bis stark 🟩 bis 🟩🟩		Wenig bis stark 🟩 bis 🟩🟩		Nicht bis wenig 🟩														
Ziele	<ul style="list-style-type: none"> Aufweichen der Beläge Wundreinigung Feuchthalten 			<ul style="list-style-type: none"> Keimreduzierung Wundreinigung Exsudatmanagement Wundrandschutz 		<ul style="list-style-type: none"> Erhaltung eines feuchtwarmen Wundmilieus Exsudatmanagement Schutz 		<ul style="list-style-type: none"> Schutz Wundruhe 		<ul style="list-style-type: none"> Schutz Förderung der Elastizität Vorbeugung hypertropher Narbenbildung* 		Schmerzen minimieren										
Wundreinigung	Je nach Wundheilungsphase und individueller Wundsituation: geeignete Reinigungsmethode und Wundspüllösung / ggf. Antiseptikum auswählen										Empfehlung: Granudacyn® Wundspüllösung											
Primärverband/ Wundfüller	Granudacyn® Wundgel		Granudacyn® Wundgel		Mepilex® Ag oder Mepilex® Transfer Ag + Mextra®		Exufiber® + Granudacyn® Wundgel		Exufiber® Ag+		bei Bedarf Granudacyn® Wundgel		Exufiber® + bei Bedarf Granudacyn® Wundgel		Mepilex® Lite + Tubifast®							
Sekundärverband	Mepilex® Lite + Tubifast®		Mepilex® Border Lite		Mepilex® XT + Tubifast®		Tubifast®		Mepilex® Ag		Mepilex® Transfer Ag		Exufiber® Ag+		Exufiber®		Mepilex® Border Flex oder Mepilex® XT + Tubifast®		Mepilex® Border Lite oder Mepitel® Film		Mepitel® Film Mepiform®	



Lösungen für spezielle Situationen

Situation	Anforderung	Lösung
Sehr stark exsudierende Wunden	Exsudatmanagement Infektionsprophylaxe/-therapie	<p>Mepitel® One einseitig beschichtetes Wunddistanzgitter</p> <p>Mepitel® beidseitig beschichtetes Wunddistanzgitter</p> <p>Mepilex® Transfer drainagefähiger Schaumverband</p> <p>Mepilex® Transfer Ag drainagefähiger Schaumverband mit Silber für kritisch kolonisierte und infizierte Wunden</p> <p>+ Mextra® Superabsorbent</p> <p>+ Tubifast® 2-WAY STRETCH TECHNOLOGY</p>
Verbrennungen bis Grad 2a	Exsudatmanagement, Infektionsprophylaxe/-therapie	<p>Mepilex® XT + Granudacyn® Wundgel</p> <p>+ Tubifast® 2-WAY STRETCH TECHNOLOGY</p> <p>Mepilex® Ag</p> <p>+ Tubifast® 2-WAY STRETCH TECHNOLOGY</p>
Chirurgische Wunden	Exsudatmanagement, Spannungsblasen vermeiden, Hautschutz	<p>Primärversorgung Mepilex® Border Post-Op</p> <p>Zum Schutz nach Nahtverschluss Mepitel® Film</p>
Strahlenbedingte Hautreaktionen	Prophylaxe, Schutz Schmerzreduzierung	<p>Mepilex® Lite</p> <p>Mepitel® Film</p>

Schaumverbände

Mepilex® XT



Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück Packung
21 10 15	5 x 5 cm	11 30 38 38	5
21 11 00	10 x 10 cm	07 05 23 36	5
21 12 00	10 x 20 cm	07 05 23 42	5
21 13 00	15 x 15 cm	07 05 23 59	5
21 14 00	20 x 20 cm	07 05 23 65	5
21 15 00	20 x 50 cm	11 47 94 60	2

Mepilex®



Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück Packung
29 40 15	5 x 5 cm	09 31 30 54	5
29 41 50	10 x 12 cm	01 60 33 38	5
29 42 50	12 x 20 cm	01 60 33 50	5
29 43 50	15 x 17 cm	01 60 33 73	5
29 44 50	20 x 22 cm	01 60 34 04	5
29 45 00	20 x 50 cm	01 16 68 14	2

Mepilex Heel

28 81 00	13 x 20 cm	04 79 10 62	5
----------	------------	-------------	---

Mepilex® Lite



Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück Packung
28 40 10	7,5 x 8,5 cm	03 64 24 43	5
28 41 10	12,5 x 12,5 cm	03 64 27 27	5
28 43 10	17,5 x 17,5 cm	03 64 27 79	5
28 45 00	20 x 50 cm	09 89 16 96	4

Mepilex® Transfer



Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück Packung
29 47 00	10 x 12 cm	04 04 79 32	5
29 48 00	15 x 20 cm	02 52 35 41	5
29 45 02	20 x 50 cm	09 89 16 73	4

Mepilex® Border Flex



Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück Packung
59 52 11	7,5 x 7,5 cm	12 59 59 84	10
59 53 11	10 x 10 cm	12 59 60 09	10
59 50 11	12,5 x 12,5 cm	12 59 60 15	10
59 54 11	15 x 15 cm	12 59 60 21	10
59 56 11	15 x 20 cm	12 59 60 38	10
58 35 00	7,8 x 10 cm	14 41 21 43	5
58 33 00	13 x 16 cm	14 41 21 95	5
58 34 00	15 x 19 cm	14 41 22 03	5

oval

Mepilex® Border



Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück Packung
29 52 55	7,5 x 7,5 cm	09 06 27 12	10
29 53 55	10 x 10 cm	09 06 27 29	10
29 54 55	15 x 15 cm	09 06 27 35	10
29 56 55	15 x 20 cm	09 06 27 41	10
29 58 00	10 x 20 cm	04 90 67 89	5
29 59 00	10 x 30 cm	05 01 82 52	5

Mepilex Border Sacrum

28 20 10	16 x 20 cm	12 49 60 70	10
28 24 10	22 x 25 cm	12 49 60 87	10

Mepilex Border Heel

28 27 10	22 x 23 cm	12 49 60 93	10
----------	------------	-------------	----

Mepilex® Border Lite



Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück Packung
28 10 00	4 x 5 cm	01 01 85 97	10
28 11 00	5 x 12,5 cm	01 01 86 11	5
28 12 00	7,5 x 7,5 cm	01 01 86 34	5
28 13 00	10 x 10 cm	01 01 86 57	5
28 15 00	15 x 15 cm	01 01 86 86	5

Antimikrobielle Wundauflagen

Mepilex® Ag



Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück Packung
28 70 50	10 x 10 cm	09 06 26 81	10
28 72 10	10 x 20 cm	02 22 72 39	5
28 73 10	15 x 15 cm	02 22 72 74	5
28 74 10	20 x 20 cm	02 23 09 68	5
28 75 10	20 x 50 cm	01 23 54 61	2

Mepilex Heel Ag

38 81 00	13 x 20 cm	06 57 49 20	5
38 83 00	15 x 22 cm	06 57 49 43	5

Mepilex® Border Ag



Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück Packung
39 52 60	7 x 7,5 cm	01 41 04 38	5
39 53 60	10 x 12,5 cm	01 41 69 49	5
39 54 60	15 x 17,5 cm	01 41 69 78	5
39 56 60	17 x 20 cm	01 43 22 91	5
39 58 00	10 x 20 cm	06 13 03 99	5
39 57 00	10 x 25 cm	06 13 04 07	5
39 59 00	10 x 30 cm	06 13 04 13	5

Mepilex Border Sacrum Ag

38 20 00	18 x 18 cm	06 13 04 36	5
38 22 00	20 x 20 cm	06 13 04 42	5
38 24 00	23 x 23 cm	06 13 04 59	5

Mepilex® Transfer Ag



Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück Packung
39 40 00	7,5 x 8,5 cm	09 54 27 77	10
39 41 00	10 x 12,5 cm	09 54 27 83	5
39 48 00	15 x 20 cm	09 54 28 14	10
39 45 00	20 x 50 cm	09 54 28 20	2

Chirurgische Wundversorgung

Mepilex® Border Post-Op



Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück Packung
49 61 00	6 x 8 cm	11 63 91 13	10
49 62 00	9 x 10 cm	11 63 91 36	10
49 63 00	10 x 15 cm	11 63 91 42	10
49 64 05	10 x 20 cm	11 63 91 59	5
49 64 55	10 x 25 cm	11 63 91 65	5
49 66 05	10 x 30 cm	11 63 91 71	5
49 66 50	10 x 35 cm	11 63 91 88	5

Wunddistanzgitter

Mepitel®



Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück Packung
29 05 00	5 x 7 cm	02 81 84 43	5
29 07 00	8 x 10 cm	02 81 84 72	5
29 10 00	12 x 15 cm	02 81 85 03	5
29 20 05	20 x 30 cm	04 66 04 72	5

Mepitel® One



Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück Packung
28 91 00	5 x 7,5 cm	03 08 97 27	10
28 91 70	6 x 7 cm	14 33 30 99	5
28 93 00	7,5 x 10 cm	03 09 00 15	10
28 92 70	9 x 10 cm	14 33 31 07	5
28 95 00	10 x 18 cm	09 50 47 59	10
28 94 70	13 x 15 cm	14 33 31 13	5
28 97 00	17 x 25 cm	09 50 84 50	5
28 97 50	27,5 x 50 cm	11 02 88 46	2

NEU ab Feb. 2020

NEU ab Feb. 2020

NEU ab Feb. 2020

Folienverbände

Narbenbehandlung

Mepitel® Film



Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück Packung
29 61 70	6 x 7 cm	04 10 73 38	10
29 62 70	10 x 12 cm	04 10 73 50	10
29 64 70	10 x 25 cm	04 10 73 73	10
29 66 70	15 x 20 cm	04 10 74 04	10

Mepiform®



Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück Packung
29 36 00	4 x 30 cm	00 08 91 87	5
29 37 00	5 x 7,5 cm	08 65 55 74	5
29 38 00	10 x 18 cm	08 65 55 97	5

Fixierung

Tubifast®



Art.-Nr.	Breite	Umfang Gliedmaße	PZN Packung	PZN Stück	Stück Packung
10 m Länge					
24 34	Rot (3,5 cm)	9-18 cm	09 93 26 91	---	1
24 36	Grün (5 cm)	14-24 cm	09 93 27 16	---	1
24 38	Blau (7,5 cm)	24-40 cm	09 93 27 39	---	1
24 40	Gelb (10,75 cm)	35-64 cm	09 93 27 45	---	1
24 44	Violett (20 cm)	64-130 cm	09 93 27 68	---	1
1 m Länge					
24 80	Rot (3,5 cm)	9-18 cm	09 93 27 74	00 14 35 38	12
24 81	Grün (5 cm)	14-24 cm	09 93 27 80	09 93 28 28	12
24 82	Blau (7,5 cm)	24-40 cm	09 93 27 97	09 93 28 34	12
24 83	Gelb (10,75 cm)	35-64 cm	09 93 28 05	09 93 28 40	12
24 79	Violett (20 cm)	64-130 cm	09 93 28 11	09 93 28 57	12

Unsteril – 10 m-Produkte auf Rolle, 1 m-Produkte einzeln verpackt

Superabsorber

Mextra® Superabsorbent



Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück Packung
61 00 00	12,5 x 12,5 cm	12 51 30 87	10
61 01 00	12,5 x 17,5 cm	12 51 31 01	10
61 02 00	12,5 x 22,5 cm	12 51 31 18	10
61 03 00	17,5 x 22,5 cm	12 51 31 24	10
61 04 00	22,5 x 27,5 cm	12 51 31 53	10
61 05 00	22,5 x 32,5 cm	12 51 31 76	10
61 06 00	22,5 x 42,5 cm	12 51 31 82	10

Wundspülung, Gele

Granudacyn®

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe	PZN Stück	Stück Karton
Wundspüllösungen, Gele und Sauerstofftherapie				
GD001	Wundspüllösung 250 ml	250 ml	11 86 51 40	15
GD002	Wundspüllösung 500 ml	500 ml	11 86 51 63	12
GD003	Wundspüllösung 1000 ml	1000 ml	11 86 52 00	6
GD006	Wundspüllösung 5000 ml	5000 ml	12 57 99 33	1
GD004	Wundspüllösung NPWT 500 ml	500 ml	11 86 52 17	12
GD005	Wundspüllösung NPWT 1000 ml	1000 ml	11 86 52 46	6

Gele

GD010	Wundgel 50 g	50 g	11 86 52 69	12
GD011	Wundgel 100 g	100 g	11 86 52 81	12
GD007	Wundgel 250 g	250 g	12 60 80 20	15

14
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Mepilex® XT

SafetaC TECHNOLOGY

Zuschnitt- und Anwendungsbeispiele



Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.com

Molnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170. Die Namen Molnlycke Health Care, sowie alle genannten entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Molnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2019 Molnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten. DW0075

Stand: Januar 2020