


WELCHER VERBAND FÜR WELCHE WUNDE?

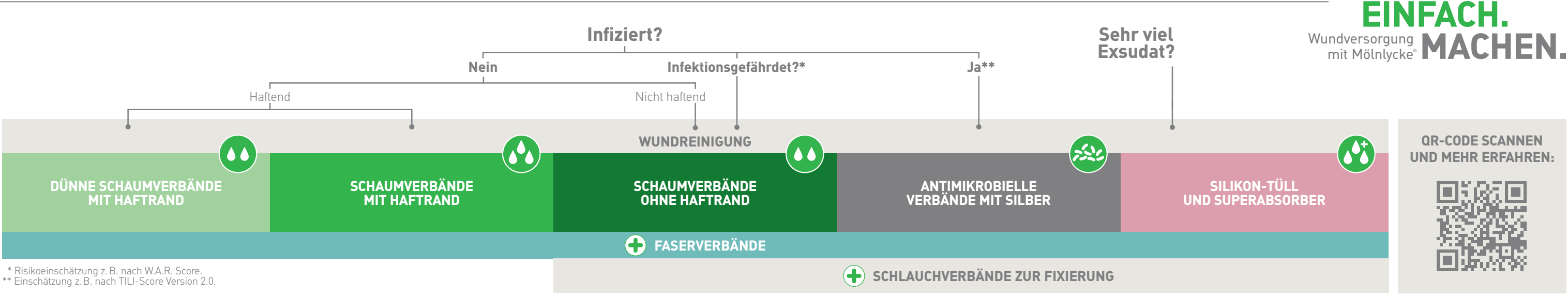

PHASENGERECHTE WUNDVERSORGUNG

	Inflammationsphase/Reinigungsphase				Granulationsphase		Epithelisierungsphase	Maturationsphase				
Wundart/ Wundzustand	Trockene, fibrinbelegte Wunden; freiliegende empfindliche Strukturen: z. B. Sehnen; Wunden mit schwacher Exsudation				Feuchte (oberflächliche) Wunden		Schwach exsudierende, epithelisierende Wunden	Gewebsstabilisierung				
Beispiel												
Exsudation	Nicht bis wenig				Mäßig bis stark bis		Nicht bis wenig					
Ziele	• Aufweichen der Beläge • Wundreinigung • Feuchthalten				• Keimreduzierung • Wundreinigung • Exsudatmanagement • Wundrandschutz		• Schutz • Wundruhe	• Schutz • Förderung der Elastizität • Vorbeugung hypertropher Narbenbildung				
Schmerzen minimieren												
Wundreinigung	Je nach Wundheilungsphase und individueller Wundsituation: geeignete Reinigungsmethode und Wundspüllösung / ggf. Antiseptikum auswählen Empfehlung: Granudacyn® Wundspüllösung											
Sauerstoff-Therapie	Wunden, deren Reduktion der Wundgröße innerhalb von 4 Wochen weniger als 40 % beträgt: zusätzliche Verabreichung von Granulox®											
Primärverband/ Wundfüller	Granudacyn® Wundgel		Granudacyn® Wundgel		Exufiber® Granudacyn® Wundgel		bei Bedarf Granudacyn® Wundgel		Exufiber® bei Bedarf Granudacyn® Wundgel		Mepilex® Lite Tubifast®	
Alternativ bei infektionsgefährdeter o. infizierter Wunde			Mepilex® Ag oder Mepilex® Transfer Ag oder Mepilex® Border Ag		Exufiber® Ag+ oder Melgisorb® Ag						Mepitel® Film	
Sekundärverband	Mepilex® Lite		Mepilex® XT Mepilex®		Mextra®		Mepilex® Border Flex oder		Mepilex® XT Mepilex®		Mepilex® Border Flex Lite oder Mepitel® Film	
Fixierung	Tubifast®											

LÖSUNGEN FÜR SPEZIELLE SITUATIONEN

SEHR STARK EXSUDIERENDE WUNDEN			VERBRENNUNGEN BIS GRAD 2A		CHIRURGISCHE WUNDEN	STRAHLENBEDINGTE HAUTREAKTIONEN	SKIN TEARS
Mepitel® One	Mepitel®	Mepilex® Transfer	Mepilex® XT + Granudacyn® Wundgel		Mepilex® Border Post-OP	Mepilex® Lite	Mepitel® One
+ Mextra® Superabsorbent							
+ Tubifast®			+ Tubifast®		Mepitel® Film	Mepitel® Film	
UNTERDRUCK-WUNDTHERAPIE							
Avance® Solo			Einweg-Unterdruck-Wundtherapiesystem zur Entfernung von Exsudat aus chirurgischen (ciNPT), akuten und chronischen Wunden (dNPWT)			Batteriebetriebenes System mit einem kontinuierlichen Unterdruck von -125 mmHg und einer Lebensdauer von 14 Tagen	

SCHAUMVERBÄNDE MIT HAFTRAND				
Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton	
Mepilex® Border Flex				
59 52 50	7,5 x 7,5 cm	5	50	eckig
59 53 50	10 x 10 cm	5	50	
59 50 50	12,5 x 12,5 cm	5	50	
59 54 11	15 x 15 cm	10	100	
59 56 11	15 x 20 cm	10	120	
58 35 00	7,8 x 10 cm	5	50	oval
58 33 00	13 x 16 cm	5	35	
58 34 00	15 x 19 cm	5	45	

Mepilex® Border Flex Lite				
58 10 50	4 x 5 cm	10	70	Neue Art.-Nr. ab 10/22
58 11 00	5 x 12,5 cm	5	65	
58 12 50	7,5 x 7,5 cm	5	70	
58 13 50	10 x 10 cm	5	50	
58 15 00	15 x 15 cm	5	50	

Mepilex® Border Sacrum				
28 20 60	16 x 20 cm	5	25	
28 24 60	22 x 25 cm	5	25	

Mepilex® Border Heel				
28 27 10	22 x 23 cm	10	30	

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
Mepilex® XT			
21 10 15	5 x 5 cm	5	40
21 11 10	12,5 x 12,5 cm	5	50
21 12 10	10 x 21 cm	5	45
21 13 10	17,5 x 17,5 cm	5	25
21 14 10	21 x 22 cm	5	20
21 15 00	20 x 50 cm	2	12

Mepilex®				
29 40 15	5 x 5 cm	5	40	
29 41 00	10 x 10 cm	5	70	
29 42 00	10 x 20 cm	5	45	
29 43 00	15 x 15 cm	5	25	
29 44 00	20 x 20 cm	5	20	
29 45 00	20 x 50 cm	2	12	

Mepilex® Heel				
28 81 00	13 x 20 cm	5	25	

Mepilex® Lite				
28 40 00	6 x 8,5 cm	5	70	
28 41 00	10 x 10 cm	5	50	
28 43 00	15 x 15 cm	5	30	
28 45 00	20 x 50 cm	4	24	

Mepilex® Transfer				
29 47 00	10 x 12 cm	5	50	
29 48 00	15 x 20 cm	5	40	
29 45 02	20 x 50 cm	4	24	

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
Mepitel® Film			
29 61 70	6 x 7 cm	10	50
29 62 70	10 x 12 cm	10	70
29 64 70	10 x 25 cm	10	50
29 66 70	15 x 20 cm	10	70

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
Mepilex® Ag			
28 71 10	10 x 10 cm	5	70
28 72 10	10 x 20 cm	5	45
28 73 10	15 x 15 cm	5	25
28 74 10	20 x 20 cm	5	20
28 75 10	20 x 50 cm	2	12

Mepilex® Heel Ag				
38 81 00	13 x 20 cm	5	25	
38 83 00	15 x 22 cm	5	30	

Mepilex® Border Ag				
39 52 60	7 x 7,5 cm	5	70	
39 53 60	10 x 12,5 cm	5	50	
39 54 60	15 x 17,5 cm	5	35	
39 56 60	17 x 20 cm	5	40	
39 58 00	10 x 20 cm	5	35	
39 57 00	10 x 25 cm	5	35	
39 59 00	10 x 30 cm	5	25	

Mepilex® Border Sacrum Ag				
38 20 00	18 x 18 cm	5	40	
38 22 00	20 x 20 cm	5	40	
38 24 00	23 x 23 cm	5	25	

Mepilex® Transfer Ag				
39 40 00	7,5 x 8,5 cm	10	70	
39 47 00	12,5 x 12,5 cm	5	50	
39 48 00	15 x 20 cm	10	50	
39 45 00	20 x 50 cm	2	12	

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
Mepilex® Border Post-Op			
49 61 00	6 x 8 cm	10	80
49 62 00	9 x 10 cm	10	70
49 63 00	10 x 15 cm	10	100
49 64 00	10 x 20 cm	10	120
49 64 50	10 x 25 cm	10	60
49 66 00	10 x 30 cm	10	40
49 66 50	10 x 35 cm	5	55

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
Mepitel®			
29 05 10	5 x 7,5 cm	10	50
29 07 10	7,5 x 10 cm	10	40
29 10 10	10 x 18 cm	10	70
29 20 05	20 x 30 cm	5	30

Mepitel® One				
Mit Abziehhilfe				
28 91 00	5 x 7,5 cm	10	70	
28 91 70	6 x 7 cm	5	70	
Ohne Abziehhilfe				
28 93 00	7,5 x 10 cm	10	40	
28 92 70	9 x 10 cm	5	50	
28 95 00	10 x 18 cm	10	70	
28 94 70	13 x 15 cm	5	50	
28 97 00	17 x 25 cm	5	40	
28 97 50	27,5 x 50 cm	2	14	

Sofern nicht anders aufgeführt, sind alle Produkte einzeln steril verpackt.

Art.-Nr.	Breite	Umfang Gliedermaße	Stück/ Karton
Tubifast® 10 m Länge, auf Rolle – unsteril			
24 34	Rot (3,5 cm)	9–18 cm	1
24 36	Grün (5 cm)	14–24 cm	1
24 38	Blau (7,5 cm)	24–40 cm	1
24 40	Gelb (10,75 cm)	35–64 cm	1
24 44	Violett (20 cm)	64–130 cm	1

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
Exufiber®			
70 99 00	5 x 5 cm	10	40
70 99 01	10 x 10 cm	10	80
70 99 03	15 x 15 cm	10	60
70 99 04	20 x 30 cm	5	25
70 99 05	4,5 x 10 cm	10	40
70 99 06	4,5 x 20 cm	10	50
70 99 07	4,5 x 30 cm	10	60
Tamponaden			
70 99 08	1 x 45 cm	5	25
70 99 09	2 x 45 cm	5	25

Exufiber® Ag+				
60 34 01	5 x 5 cm	10	40	
60 34 02	10 x 10 cm	10	60	
60 34 03	15 x 15 cm	10	60	
60 34 04	4,5 x 10 cm	10	40	
60 34 05	4,5 x 20 cm	10	50	
60 34 06	4,5 x 30 cm	10	60	
60 34 07	20 x 30 cm	5	20	
Tamponade				
60 34 00	2 x 45 cm	5	20	

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
Avance® Solo			
888 00 50	Avance® Solo Pumpe / Starter Set	1	2
88 10 20	Avance® Solo Wundverband 10 x 20 cm	2	4
88 10 30	Avance® Solo Wundverband 10 x 30 cm	2	4
88 10 35	Avance® Solo Wundverband 10 x 35 cm	2	4
88 15 15	Avance® Solo Wundverband 15 x 15 cm	2	4
88 15 20	Avance® Solo Wundverband 15 x 20 cm	2	4
88 15 30	Avance® Solo Wundverband 15 x 30 cm	2	4
88 20 20	Avance® Solo Wundverband 20 x 20 cm	2	4
88 25 25	Avance® Solo Wundverband 25 x 25 cm	2	4
88 20 00	Avance® Solo / Adapt Wundfüller	4	8
88 00 50	Avance® Solo / Adapt Kanister (50 ml)	4	8
Set	888 10 20 Avance® Solo Set: Pumpe inkl. Wundverband 10 x 20 cm – ciNPT	1	2
	888 10 30 Avance® Solo Set: Pumpe inkl. Wundverband 10 x 30 cm – ciNPT	1	2
	888 10 35 Avance® Solo Set: Pumpe inkl. Wundverband 10 x 35 cm – ciNPT	1	2
999 41 52	Avance® Solo Adapt Set: Pumpe inkl. Filmverband u. Wundfüller – dNPWT	1	2
99 41 52	Avance® Solo Adapt Filmverbandset 20 x 27 cm – dNPWT	5	5
99 40 00	Avance® Solo Adapt Filmverband 20 x 27 cm – dNPWT	5	10

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
Mepiform®			
29 36 00	4 x 30 cm	5	50
29 37 00	5 x 7,5 cm	5	25
29 38 00	10 x 18 cm	5	35

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de
Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf,
Tel. +49 211 920 88-0, Fax +49 211 920 88-170
Der Name Mölnlycke Health Care und das Safetac Logo sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2022 Mölnlycke Health Care AB.
Alle Rechte vorbehalten.
DWC0090

Stand: August 2022

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
Mextra® Superabsorbent			
61 07 00	10 x 10 cm	10	50
61 07 10	10 x 15 cm	10	40
61 07 20	10 x 20 cm	10	90
61 07 30	15 x 20 cm	10	40
61 07 40	20 x 25 cm	10	40
61 07 50	20 x 30 cm	10	50
61 07 60	20 x 40 cm	10	50

Art.-Nr.	Größe	Stück/ Packung	Stück/ Karton
Melgisorb® Plus*			
25 20 00	5 x 5 cm	10	100
25 22 00	10 x 10 cm	10	100
25 25 00	10 x 20 cm	10	100
Tamponade			
25 35 00	3 x 45 cm	5	50

Melgisorb® Ag				
25 60 55	5 x 5 cm	10	100	
25 61 05	10 x 10 cm	10	100	
25 61 55	15 x 15 cm	10	100	
Tamponade				
25 66 05	3 x 44 cm	10	100	

Art.-Nr.	Größe	PZN Packung	Stück/ Packung
Granulox® Hämoglobin-Spray*			
360001	12 ml/ ca.30 Anwendungen	09 50 57 53	6

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Größe	Stück/ Karton
Granudacyn® Wundspüllösung und Gel*			
36 01 50	Wundspüllösung 50ml	50 ml	20
36 01 00	Wundspüllösung 250ml	250 ml	15
36 01 01	Wundspüllösung 500ml	500 ml	12
36 01 02	Wundspüllösung 1000ml	1000 ml	6
36 01 03	Wundspüllösung NPWT 500ml	500 ml	12
36 01 04	Wundspüllösung NPWT 1000ml	1000 ml	6
36 01 07	Wundgel 50 g	50 g	12
36 01 08	Wundgel 100 g	100 g	12
36 01 06	Wundgel 250 g	250 g	15

