

Gut zu wissen

Nach der Reinigung mit antiseptischer Seife, z.B. Descutan®, die Haut vor dem Aufbringen der Wundauflage gründlich abspülen und trocknen. Andernfalls könnten Seifenreste die Haftung der Wundauflage beeinträchtigen.

Damit der Rand sich nicht aufrollt, **entfernen Sie die Schutzfolien nicht auf einmal.**

Achten Sie bei der Applikation darauf, den Wundverband nicht zu überdehnen und bringen sie ihn möglichst faltenfrei auf.



Proving it every day!

Wir bei Mölnlycke® liefern innovative Lösungen für die Behandlung von Wunden, die Verbesserung der Sicherheit und Effizienz im OP sowie die Prävention von Dekubitus. Unsere Lösungen sorgen für bessere Ergebnisse und werden durch klinische und gesundheitsökonomische Nachweise belegt.

Unsere gesamte Arbeit hat ein einziges Ziel: Wir möchten medizinischen Fachkräften dabei helfen, ihr Bestes zu geben. Das beweisen wir jeden Tag.



Investieren Sie eine Minute für Ihren Patient!

Applikationsleitfaden

Bestellinformationen Mepilex Border Post-OP

Klinik		Home Care			
Größe in cm	Art.-Nr.	Packung/ Karton	Art.-Nr.	PZN/ Packung	Packung/ Karton
6 x 8	496100	10/80	496100	11 63 91 13	10/80
9 x 10	496200	10/70	496200	11 63 91 36	10/70
10 x 15	496300	10/100	496300	11 63 91 42	10/100
10 x 20	496400	10/120	496405	11 63 91 59	5/120
10 x 25	496450	10/60	496455	11 63 91 65	5/25
10 x 30	496600	10/40	496605	11 63 91 71	5/25
10 x 35	496650	5/55	496650	11 63 91 88	5/55

Mepilex Border Post-OP ist auch in Mölnlycke OP-Trays erhältlich.

Referenzen:

1. Rhidian M.J. et al. Consensus, Incision care and dressing selection in surgical wounds: Findings from an International meeting of surgeons. Wounds International, 2019 2. Beele et al. - A randomised controlled trial comparing two wound dressings used after elective hip and knee arthroplasty. International Journal of Orthopaedic and Trauma Nursing, 2020 3. Zarghooni K. et al. - Is the use of modern versus conventional wound dressings warranted after primary knee and hip arthroplasty? Acta Orthopaedica Belgica, 2015 4. Bredow J, Hoffmann K, Oppermann J, Hellmich M, Eysel P, Zarghooni K - Evaluation of Absorbent Versus Conventional Wound Dressing. A Randomized Controlled Study in Orthopedic Surgery. Deutsches Ärzteblatt International, 2018 5. Peghetti A. - Prevention of post-operative surgical site complications: A quality improvement project. Posterpräsentation auf dem EWMA-Kongress, Krakau 2018. 6. External test at Nelson Laboratories (viral penetration test), Lab Report 322509 and 413098. 7. Statement towards ASTM F 1671 (viral penetration test), PD-404335.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, DEUTSCHLAND
T +49 (0)211 920 880 F +49 (0)211 920 88 170 www.molnlycke.de
Mölnlycke Health Care GmbH, Wagenseilgasse 14, 1120 Wien, ÖSTERREICH
T +43 1 278 85 42 F +43 1 278 85 42 199 www.molnlycke.at

Die Marken Mölnlycke und Mepilex sowie die Namen und Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Unternehmen der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2020 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DEATIM000901



Mepilex® Border Post-Op



Beginnen Sie immer mit einer sorgfältigen Reinigung der Wunde und der umliegenden Haut. Entfernen Sie jegliche Rückstände, z.B. Wundbeläge und Reste von Wundspülungen. Die Haut muss vor dem Aufbringen der Wundauflage vollständig trocken sein!

Applikation mit **3**-teiliger Schutzfolie

1.

Entfernen Sie teilweise die mittlere Schutzfolie mit den **violetten Streifen**, um die Wundauflage aufzubringen. Entfernen Sie nicht die gesamte Schutzfolie auf einmal.



2.

Entfernen Sie die mittlere Schutzfolie langsam und Stück für Stück, während Sie die aufgebrachte Wundauflage glattstreichen.



3.

Fahren Sie auf die gleiche Weise fort - zuerst mit der längeren der beiden Schutzfolien und dann mit der kürzeren. **Streichen Sie abschließend noch einmal über die gesamte Wundauflage.**



Applikation mit **2**-teiliger Schutzfolie

1.

Entfernen Sie teilweise die Schutzfolie mit dem **violetten Streifen** und positionieren Sie die Wundauflage an der richtigen Stelle.



2.

Entfernen Sie langsam die Schutzfolie, während Sie die aufgebrachte Wundauflage glattstreichen.



3.

Entfernen Sie vorsichtig den zweiten Teil, während Sie die Wundauflage glattstreichen. **Streichen Sie am Ende nochmal über die komplette Wundauflage.**



Wenn kein Wechsel erforderlich ist

Mepilex Border Post-Op wurde entwickelt, um **Blut sehr effektiv zu absorbieren** und vom Inzisionsbereich abzuleiten. Die hochabsorbierenden Fasern des Wundkissens sorgen dafür, dass das Blut zurückgehalten wird. Dadurch wird die **Anzahl möglicherweise kontaminierender Verbandwechsel möglichst gering gehalten.**

Daher, und aufgrund der Tatsache, dass die Wundauflage Hautschäden und das Verkleben des Verbandes mit der Wunde minimiert, trägt Mepilex Border Post-Op dazu bei, **das Risiko einer postoperativen Wundinfektion zu verringern¹⁻⁷.**

Wenn Sie eine Einblutung in der Wundauflage sehen, ist dies kein Grund für einen Verbandwechsel. Lassen Sie die Wundauflage ihre Arbeit tun – **wechseln Sie sie nur, wenn es nötig ist.**

Die nachfolgenden Bilder zeigen, wann ein Verbandwechsel notwendig ist!

Verband nicht wechseln!

Mepilex® Border Post-Op

Verband wechseln!

