

Wundverlauf

Von Marianne Hintner
Leitung Wundteam WCC

Exufiber® Ag+ und Mepilex®

Wundanamnese

Hr. A., 76 J.,

Diabetisches Fußulkus mit Peripherer arterieller Verschlusskrankheit Grad 4

Z.n. Femoro-poplitealem Bypass

Z.n. Osteomyelitis, Osteolyse

Stagnierende Wundverhältnisse, freiliegender Knochen, polyneuropathischer Schmerz

Exufiber® Ag+

MIT HYDROLOCK® TECHNOLOGIE UND SILBER

Mepilex®


Mölnlycke®

Wundverlauf

Exufiber® Ag+ und Mepilex®

05.08.19



Wundgröße: 6 cm², Tiefe: ca. 2 cm
Wundreinigung: Wundspüllösung
Prontosan, mechanisches Debridement,
austamponiert mit Exufiber Ag+
Sekundärverband:
Mepilex® & Klebevlies
VW-Intervall: 2 x/Woche

19.08.19



Wundgröße: 3 cm², Tiefe: ca. 0,5 cm
Wundreinigung: Wundspüllösung
Prontosan, mechanisches Debridement,
austamponiert mit Exufiber Ag+
Sekundärverband:
Mepilex® & Klebevlies
VW-Intervall: 2 x/Woche

14.09.19



Wundgröße: 1,5 cm², oberflächlich
Wundreinigung: Wundspüllösung
Prontosan, mechanisches Debridement,
austamponiert mit Exufiber Ag+
Sekundärverband:
Mepilex® & Klebevlies
VW-Intervall: 2 x/Woche

Größenreduktion von 6 cm² auf 1,5 cm² in 3,5 Wochen, bemerkenswerte Granulation über den freiliegenden Knochen.

Exufiber® Ag+

MIT HYDROLOCK® TECHNOLOGIE UND SILBER

Mepilex®


Mölnlycke®

Wundverlauf

Exufiber® Ag+ und Mepilex®

Von Marianne Hintner
Leitung Wundteam WCC

Wundanamnese

Fr. B., 54 J.,

postoperative Wundinfektion nach Sprunggelenksoperation

3 cm tiefe Fistel bis zum Knochen; Fadenreste, Biofilm

Viel, grünliches Exsudat

Starke Schmerzen

Seit 3 Monaten in ärztlicher Behandlung – stagnierende Wundverhältnisse

Exufiber® Ag+

MIT HYDROLOCK® TECHNOLOGIE UND SILBER

Mepilex®


Mölnlycke®

Wundverlauf

Exufiber® Ag+ und Mepilex®

16.09.19



Wundgröße: 8 cm², Tiefe: ca. 3 cm
Wundreinigung: Wundspüllösung
Octenilin, mechanisches Debridement,
austamponiert mit Exufiber® Ag+
Sekundärverband:
Mepilex® & Klebevlies
VW-Intervall: 2 x/Woche

30.09.19



Wundgröße: 2 cm², Tiefe: ca. 1 cm
Wundreinigung: Wundspüllösung
Veriforte, mechanisches Debridement,
austamponiert mit Exufiber® Ag+
Sekundärverband:
Mepilex® & Klebevlies
VW-Intervall: 2 x/Woche

28.10.19



Wundgröße: 0,5 cm², Tiefe: ca. 0,5 cm
Wundreinigung: Wundspüllösung
Veriforte, mechanisches Debridement,
austamponiert mit Exufiber® Ag+
Sekundärverband:
Mepilex® & Klebevlies
VW-Intervall: 2 x/Woche

Infektionsbekämpfung, Größenreduktion von 8 cm² auf 0,5 cm² in 6 Wochen, wichtiger die Tiefenreduktion von 3 auf 0,5 cm in 2 Wochen, trotz freiliegendem Knochen.

Exufiber® Ag+

MIT HYDROLOCK® TECHNOLOGIE UND SILBER

Mepilex®


Mölnlycke®

Wundverlauf

Exufiber® und Mepilex® XT

Von Marianne Hintner
Leitung Wundteam WCC

Wundanamnese

Fr. K., 94 J.,

Ulcus cruris mixtum linker Unterschenkel nach Trauma bei Blutverdünnung

Rheuma, COPD, Herzinsuffizienz, Cortisonhaut

Tiefer Defekt, massiv schmerzhaft, stark blutend bei Manipulation

Exufiber®

MIT HYDROLOCK® TECHNOLOGIE

Mepilex® XT


Mölnlycke®

Wundverlauf

Exufiber® und Mepilex® XT

11.04.19



Wundgröße: 120 cm², Tiefe: ca. 2 cm
Wundreinigung: Wundspüllösung
Octenilin, mechanisches-chirurgisches
Debridement, Exufiber® austamponiert
und oberflächlich appliziert
Sekundärverband: Mepilex®XT
Fixierung: elastische Mullbinde,
Wattepolsterung, Tubifast®
VW-Intervall: 3 x/Woche

09.05.19



Wundgröße: 80 cm², Tiefe: ca. 0,5 cm
Wundreinigung: Wundspüllösung
Octenilin, mechanisches Debridement,
Exufiber® oberflächlich appliziert
Sekundärverband: Mepilex®XT
Fixierung: elastische Mullbinde,
Wattepolsterung, Tubifast®
VW-Intervall: 2 x/Woche

04.07.19



Wundgröße: 1 cm²
Wundreinigung: Wundspüllösung
Octenilin
Sekundärverband: Mepilex®XT
Fixierung: elastische Mullbinde
VW-Intervall: 1 x/Woche

Größenreduktion von 120 cm² auf 1 cm² in 12 Wochen.

Exufiber®

Mepilex® XT

MIT HYDROLOCK® TECHNOLOGIE


Mölnlycke®

Wundverlauf

Von Marianne Hintner
Leitung Wundteam WCC

Exufiber® Ag+ und Mepilex®

Wundanamnese

Fr. J., 87 J.,

Ulcus cruris traumaticus, seit ca 1 Jahr in Behandlung, stagnierender Wundverlauf

Zuweisung vom Hausarzt

Fibrin, Biofilm

Mäßig seröses Exsudat

Exufiber® Ag+

MIT HYDROLOCK® TECHNOLOGIE UND SILBER

Mepilex®


Mölnlycke®

Wundverlauf

Exufiber® Ag+ und Mepilex®

28.10.19



Wundgröße: 32 cm²

Wundreinigung: Wundspüllösung
Octenilin, mechanisches-chirurgisches
Debridement, Exufiber®Ag+ oberfläch-
lich appliziert

Sekundärverband:
Mepilex® & Klebevlies
VW-Intervall: 2 x/Woche

28.11.19



Wundgröße: 6 cm²

Wundreinigung: Wundspüllösung
Veriforte, mechanisches Debridement,
Exufiber®Ag+ oberflächlich appliziert

Sekundärverband:
Mepilex® & Klebevlies
VW-Intervall: 1 x/Woche

18.12.19



Wundgröße: 0 cm²

Größenreduktion von 32 cm² auf 0 cm² in 7 Wochen, bemerkenswert, weil die Wunde bereits 1 Jahr vorbehandelt wurde.

Exufiber® Ag+

MIT HYDROLOCK® TECHNOLOGIE UND SILBER

Mepilex®


Mölnlycke®

Wundverlauf

Von Marianne Hintner
Leitung Wundteam WCC

Exufiber® Ag+ und Mextra® Superabsorbent

Wundanamnese

Fr. M., 80 J.,

dekompensierte Herzinsuffizienz, Ulcus cruris mixtum, Thrombektomie, Z.n. femopop.Bypass, Z.n. div. Stents, Lipofasziodermatosklerose mit Calzinose, multiallergisch
seit Dez. 2017 rezidivierende Ulcera

Exufiber® Ag+

MIT HYDROLOCK® TECHNOLOGIE UND SILBER

Mextra® Superabsorbent


Mölnlycke®

Wundverlauf

Exufiber® Ag+ und Mextra® Superabsorbent



Wundgröße: 15 cm²

Wundreinigung: Wundspüllösung
Octenilin, mechanisches Debridement,
Exufiber® oberflächlich appliziert

Sekundärverband: Mextra® Superabsorbent (Silikonunverträglichkeit)

Fixierung: elastische Mullbinde

VW-Intervall: 2 x/Woche



Wundgröße: 6 cm²

Wundreinigung: Wundspüllösung
Veriforte, mechanisches Debridement,
Exufiber® oberflächlich appliziert

Sekundärverband: Mextra® Superabsorbent (Silikonunverträglichkeit)

Fixierung: elastische Mullbinde

VW-Intervall: 2 x/Woche



Wundgröße: 0 cm²

Wundgrößenreduktion von 15 auf 0 cm² in 12 Wochen, bemerkenswert die vielen Comorbiditäten und Allergien

Exufiber® Ag+

MIT HYDROLOCK® TECHNOLOGIE UND SILBER

Mextra® Superabsorbent


Mölnlycke®

Wundverlauf

Exufiber® und Mepilex®

Von Marianne Hintner
Leitung Wundteam WCC

Wundanamnese

Hr. S., 92 J.

Z.n. Plattenepithel-Carcinom am Kopf ,Z.n. Strahlentherapie

Knochen freiliegend, keine Infektzeichen

Exufiber®

MIT HYDROLOCK® TECHNOLOGIE

Mepilex®


Mölnlycke®

Wundverlauf

Exufiber® und Mepilex®



Wundfläche: ca. 120 cm²

Wundreinigung: Wundspüllösung
Veriforte, mechanisches Debridement,
Medihoney auf freiliegende Knochenan-
teile aufgetragen, Exufiber® oberfläch-
lich appliziert

Sekundärverband: Mepilex® & Klebevlies

VW-Intervall: 2 x/Woche



Wundfläche: 60 cm²

Wundreinigung: Wundspüllösung
Veriforte Lösung, mechanisches
Debridement, Medihoney auf freilie-
gende Knochenanteile aufgetragen,
Exufiber® oberflächlich appliziert

Sekundärverband: Mepilex® & Klebevlies

VW-Intervall: 2 x/Woche



Wundfläche: 2 cm²

Wundreinigung: Wundspüllösung
Veriforte Lösung, mechanisches
Debridement,

Sekundärverband: Mepilex® & Klebevlies

VW-Intervall: 1 x/Woche

Wundflächenreduktion von 120 cm² auf 2 cm² in 9 Wochen, bemerkenswert die Granulation über freiliegenden Knochen bei bestrahlter Haut.

Exufiber®

Mepilex®

MIT HYDROLOCK® TECHNOLOGIE


Mölnlycke®