

Mepilex[®] Border Lite

Der dünne, duschfeste All-In-One Schaumverband

Polyurethanfilm


- Atmungsaktiv
- Wasserdicht
- Viren- und bakterienundurchlässig (Mikroben > 25nm)⁶

Mehrschichtiges Saugkissen

- Polyurethanschaum für rasche Absorption des Exsudats

Verteilungsschicht als Vlies

- Für eine optimale Verteilung des Exsudats

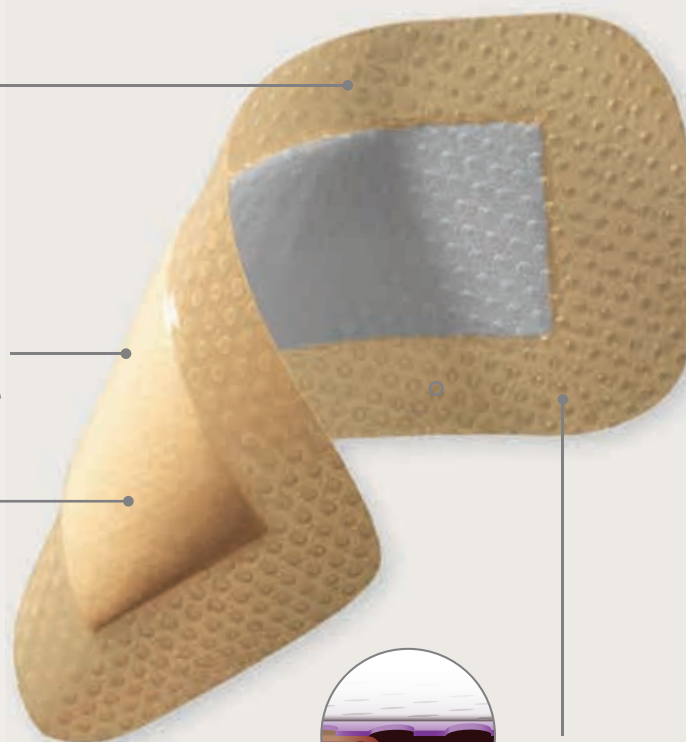

Safetac[®]- Beschichtung

Reduziert nachweislich die Schmerzen beim Verbandwechsel und die Schädigung der Haut¹⁻⁴

Die Safetac Beschichtung haftet sanft an der intakten Haut und nicht an der Wunde¹⁻⁴




- Minimiert Trauma und Schmerz beim Verbandwechsel^{1,2}
- Ideal für nicht bis wenig exsudierende Wunden
- Haftet sicher und kann rückstandslos entfernt werden


Mepilex[®] Border Lite


Mölnlycke[®]

Anwendungshinweise

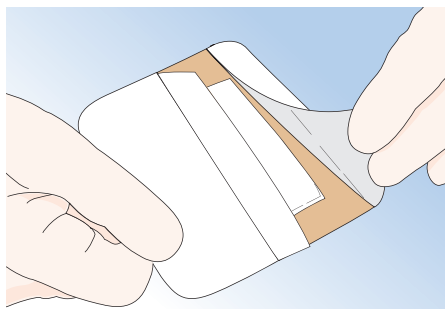

Reinigen Sie die Wunde und trocknen Sie die wundumgebende Haut. Entfernen Sie die Schutzfolie.

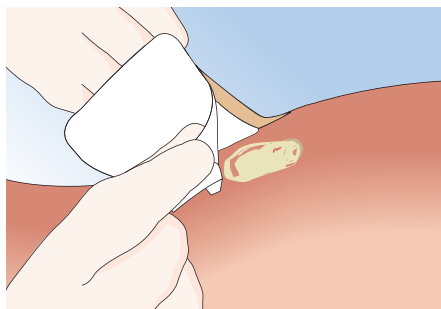

Applizieren Sie nun das Produkt auf der Wunde.

So funktioniert Mepilex® Border Lite

Mepilex Border Lite ist ein dünner All-In-One Schaumverband der Wundexsudat aufnimmt und ein feuchtes Wundmilieu aufrecht erhält. Die Safetac Schicht versiegelt die Wundränder, minimiert bzw. verhindert dadurch das Auslaufen von Exsudat in die Wundumgebung und reduziert somit das Mazerationsrisiko.⁷ Die Safetac-Beschichtung gewährleistet einen atraumatischen und nahezu schmerzfreien Verbandwechsel.

Vorteile von Mepilex® Border Lite

- Haftung: nur auf trockener Wundumgebung, keine Haftung auf der feuchten Wunde
- Kombinierbar Gelen und Salben
- Dünn und hoher Tragekomfort⁵
- Unter Kompression einsetzbar
- Je nach Wundzustand und Exsudatmenge, kann es mehrere Tage auf der Wunde belassen werden
- Duschfest, viren- und bakterienundurchlässig
- Atmungsaktiv

Bestellinformationen

Home Care & Klinik

Art.-Nr.	Größe	Größe Wundkissen	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton
28 10 00	4 x 5 cm	2 x 3 cm	01 01 85 97	10	70
28 11 00	5 x 12,5 cm	2,5 x 8,5 cm	01 01 86 11	5	65
28 12 00	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	01 01 86 34	5	70
28 13 00	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	01 01 86 57	5	50
28 15 00	15 x 15 cm	11 x 11 cm	01 01 86 86	5	50

Steril – einzeln verpackt

Anwendungsempfehlungen:

Mepilex Border Lite ist für oberflächliche, akute/traumatische und chronische Wunden, mit leichter bis keiner Exsudation sowie für die Versorgung von postoperativen Wunden geeignet.

Beispiele: Abschürfungen, Blasen und Hautrisse, Schnitt- und Finger-/Zehenverletzungen, Diabetische Fußulzationen, Ulcus cruris, Dekubitus.

Wichtige Hinweise!

Das Wundkissen muss die Wunde komplett abdecken; hierzu sollte Mepilex Border Lite den Wundrand mindestens 2 cm überlappen.

Die Wunde sollte stets auf Anzeichen einer Infektion überwacht werden. Die Einbeziehung von medizinischem Fachpersonal und eine adäquate Infektionstherapie sind bei Anzeichen/Auftreten einer Infektion unerlässlich.



REFERENZEN: **1.** White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. **2.** Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10[2]:7-10. **3.** Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007; 16[3]:97-100. **4.** Zillmer, R., Agren, M.S., Gottrup, F., Karlsmark, T. Biophysical effects of repetitive **5.** Meuleneire, F. Management of diabetic foot ulcers using dressings with Safetac: a review of case studies. Wounds UK 2008;4[4]:16-30. **6.** External test (Nelson laboratories), filed in Laboratory Dep MHC. removal of adhesive dressings on peri-ulcer skin. Journal of Wound Care 2006;15[5]:187-191. **7.** White, R. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK 2005; 1: 3, 104-109

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170.
Mölnlycke Health Care, das Safetac® Logo und das Produkt Mepilex® Border Lite sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0058

