

Mepilex[®] Border Lite

Der dünne, duschfeste All-In-One Schaumverband

Polyurethanfilm


- Atmungsaktiv
- Wasserdicht
- Viren- und bakterienundurchlässig

Mehrschichtiges Saugkissen

- Polyurethanschaum für rasche Absorption des Exsudats

Verteilungsschicht als Vlies

- für eine optimale Verteilung des Exsudats

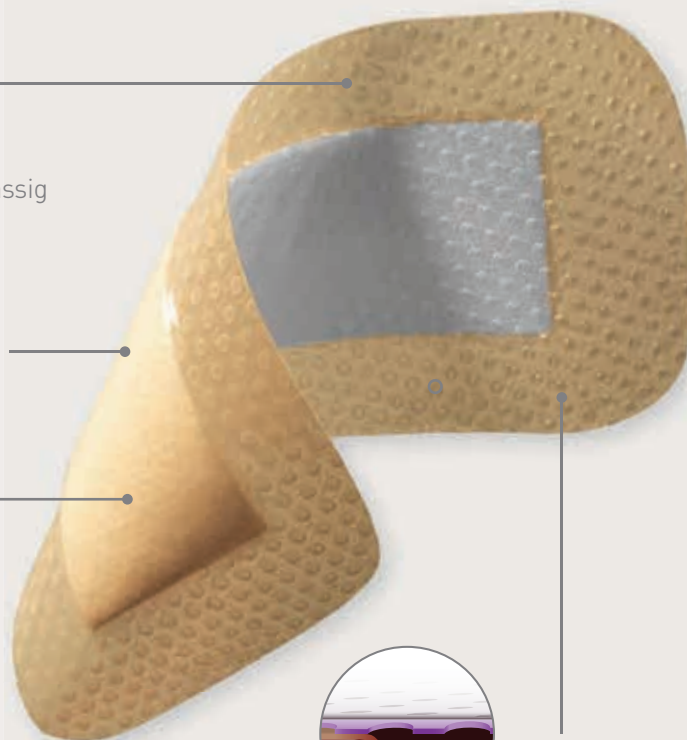

Safetac[®]- Beschichtung

Reduziert nachweislich die Schmerzen beim Verbandwechsel und die Schädigung der Haut^{1,5,6}

Die Safetac[®] Beschichtung haftet sanft an der intakten Haut und nicht an der Wunde^{1,5,6}




- Minimiert Trauma und Schmerz beim Verbandwechsel^{1,2}
- Ideal für nicht bis wenig exsudierende Wunden
- Haftet sicher und kann rückstandslos entfernt werden


Mepilex[®] Border Lite


Mölnlycke[®]

Anwendungshinweise

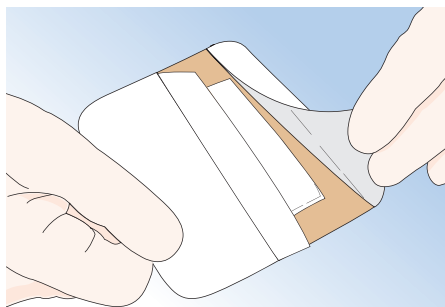

Reinigen Sie die Wunde und trocknen Sie die wundumgebende Haut. Entfernen Sie die Schutzfolie.

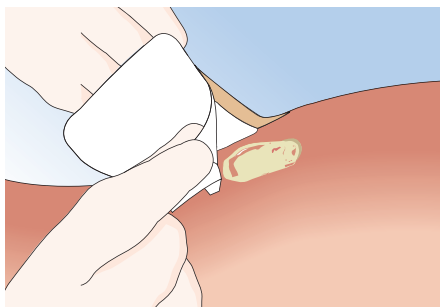

Applizieren Sie nun das Produkt ohne Zug auf der Wunde.

So funktioniert Mepilex® Border Lite

Mepilex® Border Lite ist ein dünner All-In-One Schaumverband der Wundexsudat aufnimmt und ein feuchtes Wundmilieu aufrecht erhält. Die Safetac® Schicht versiegelt die Wundränder, minimiert bzw. verhindert dadurch das Überlaufen von Exsudat in die Wundumgebung und reduziert somit das Mazerationsrisiko. Die Safetac®-Beschichtung gewährleistet einen atraumatischen und nahezu schmerzfreien Verbandswechsel.

Vorteile von Mepilex® Border Lite

- Haftung: nur auf der trockenen Wundumgebung, keine Haftung auf der feuchten Wunde
- Kombinierbar mit Gelen, Salben, etc.
- Dünn und hoher Tragekomfort
- Unter Kompression einsetzbar
- Je nach Wundzustand und Exsudatmenge, kann es mehrere Tage auf der Wunde belassen werden
- Duschfest, Viren- und Bakteriendicht
- Atmungsaktiv

Bestellinformationen

Home Care & Klinik

Art.-Nr.	Größe	Größe Wundkissen	PZN/Packung	Stück/Packung	Stück/Karton
28 10 00	4 x 5 cm	2 x 3 cm	01 01 85 97	10	70
28 11 00	5 x 12,5 cm	2,5 x 8,5 cm	01 01 86 11	5	65
28 12 00	7,5 x 7,5 cm	4,5 x 4,5 cm	01 01 86 34	5	70
28 13 00	10 x 10 cm	6,5 x 6,5 cm	01 01 86 57	5	50
28 15 00	15 x 15 cm	11 x 11 cm	01 01 86 86	5	50

Steril – einzeln verpackt

Referenzen: 1. White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. 2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. 3. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-100.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170. Mölnlycke Health Care, das Safetac® Logo und das Produkt Mepilex® Border Lite sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.

Anwendungsempfehlungen:

Mepilex® Border Lite ist für oberflächliche, akute/traumatische und chronische Wunden, mit leichter bis keiner Exsudation sowie für die Versorgung von postoperativen Wunden geeignet.

Beispiele: Abschürfungen, Blasen und Hautrisse, Schnitt- und Finger-/Zehnerletzungen, Diabetisches Fußsyndrom, Ulcus cruris, Dekubiti.

Wichtige Hinweise!

Mepilex® Border Lite sollte mindestens 2cm über den Wundrand überlappen. Das Wundkissen sollte den Wundbereich zur Gänze abdecken! Der Produktrand sollte faltenfrei sein auf der gesunden Wundumgebungshaut haften. (evtl. die Haut dafür etwas dehnen)

Vorsicht bei Entzündungs- oder leichten Infektionszeichen. Hier ist es notwendig eine adäquate Behandlung einzuleiten. Das Produkt kann evtl. noch weiter verwendet werden.

Kontraindikation: bei manifestierten Infektionen

