

# Anwendungsbeispiele Mepilex® Border Flex

Mepilex® Border Flex  
15x15 cm



1. Entfernen Sie den mittleren Teil der Schutzfolie.



2. Applizieren Sie den Verband auf die Wunde.



3. Entfernen Sie den zweiten Teil der Schutzfolie.



4. Entfernen Sie den dritten Teil der Schutzfolie.



5. Glätten Sie den Verband und die Ränder.

Mepilex® Border Flex  
10x10 cm



1. Lösen Sie den größeren Teil der Schutzfolie ab.



2. Positionieren Sie den Verband auf der Wunde



3. Ziehen Sie den größeren Teil der Schutzfolie komplett ab.



4. Entfernen Sie nun auch den zweiten Teil der Schutzfolie



5. Glätten Sie den Verband und die Ränder

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 880, Fax +49 211 920 88 170. Die Namen Mölnlycke Health Care sowie alle genannten Produkte sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. ©2018 Mölnlycke Health Care. Alle Rechte vorbehalten.

  
**Mölnlycke®**