

# Melgisorb® Ag

## Antimikrobieller Alginatverband

### Kalzium Alginatverband

- Bietet lang anhaltende, antimikrobielle Wirkung




### Alginat mit Carboxymethylcellulose

- Für stark exsudierende Wunden
- Für flache und tiefe Wunden
- Ermöglicht das Entfernen in einem Stück




- Ausgezeichnete Absorption für stark exsudierende, tiefe Wunden
- Schnelle und lang anhaltende antimikrobielle Wirkung
- Hohe Faserfestigkeit ermöglicht das Entfernen in einem Stück


## Anwendungshinweise

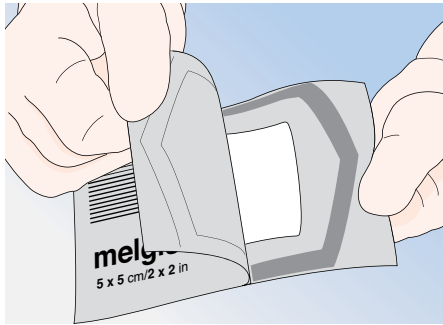

Reinigen und spülen Sie die Wunde gemäß den bestehenden Richtlinien. Den Verband entsprechend der Wundgröße zuschneiden oder zusammenfalten.

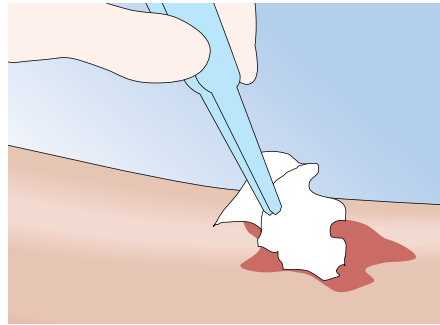

Tiefe Wunden locker füllen und darauf achten, dass der Verband nicht über die Wundränder hinausragt. Direkt auf das Wundbett legen.

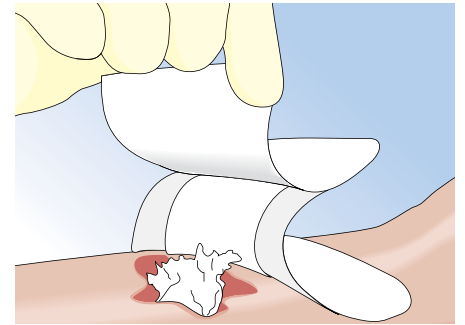

Melgisorb® Ag mit einem Sekundärverband abdecken und befestigen.

## Anwendungsempfehlungen

Melgisorb® Ag ist für die Behandlung von mässig bis stark sezernierenden Wunden mit oberflächennaher bis tiefer Ausdehnung geeignet wie zum Beispiel bei:

- Chirurgischen Wunden
- Traumatischen Verletzungen
- Beingschwüren
- Druckgeschwüren
- Diabetischen/neuropathischen Geschwüren
- Hautentnahmestellen

Melgisorb® Ag ist unter medizinischer Aufsicht für den Einsatz bei Wunden geeignet, die eine kritische Kolonisierung mit Bakterien aufweisen. Dieses Produkt kann auch unter Kompressionsbandagen verwendet werden. Da Melgisorb® Ag Alginat enthält, kann es zudem zur Stillung kleinerer Blutungen von oberflächlichen Wunden beitragen. Melgisorb® Ag ist ausschließlich für äußerliche Anwendungen geeignet.

## Wichtige Hinweise!

Der Einsatz von Melgisorb® Ag ist in folgenden Fällen kontraindiziert:

- Bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Alginat oder Silber
- Bei chirurgischen Implantationen
- Bei der Stillung einer schweren Blutung
- Bei der direkten Auflage auf trockene oder kaum sezernierende Wunden

### Bitte beachten:

- Im Falle einer klinisch manifesten Infektion ersetzt der lokale Einsatz von Silber eine systemische oder andere adäquate Infektionstherapie nicht.
- Der Verband kann bei Verwendung auf trockenen bzw. kaum sezernierenden Wunden haften bleiben. Lässt sich der Verband nicht problemlos wechseln, feuchten Sie ihn mit einer sterilen Kochsalzlösung an und entfernen Sie ihn erst dann.

- Vermeiden Sie den Kontakt mit Elektroden oder leitenden Gels während elektronischer Messungen wie z.B. Elektrokardiogramm (EKG) und Elektroenzephalogramm (EEG).
- Der Verband muss vor einer Magnetresonanztomographie (MRT) entfernt werden.

## Bestellinformationen

### Home Care & Klinik

Art.-Nr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung
<b>Kompressen</b>			
25 60 55	5 x 5 cm	01 56 08 24	10
25 61 05	10 x 10 cm	01 56 08 30	10
25 61 55	15 x 15 cm	01 56 08 47	10
<b>Tamponade</b>			
25 66 05	3 x 44 cm	01 56 09 59	10

Steril – einzeln verpackt



Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170.  
Mölnlycke® und das Produkt Melgisorb® Ag sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.  
© 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.

  
**Mölnlycke®**