

# Mepilex® Ag


## Antimikrobieller Schaumverband mit Silber

### Polyurethanfilm

- Atmungsaktiv
- Wasserdicht
- Viren- und bakteriendicht

### Polyurethanschaum

- Absorbiert Exsudat
- Kann unter Kompression verwendet werden
- Passt sich den Körperkonturen an

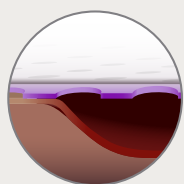

Safetac®- Beschichtung

### Reduziert nachweislich die Schmerzen beim Verbandwechsel und die Schädigung der Haut<sup>1,5,6</sup>

Die Safetac® Beschichtung haftet sanft an der intakten Haut und nicht an der Wunde<sup>1,5,6</sup>

### Antimikrobieller Effekt


- bereits nach 30 Minuten und bis zu 7 Tage lang<sup>3</sup>




Mepilex® Ag muss bei Kompression nicht auf die Größe der Wunde zugeschnitten werden

- Haftet sanft und sicher und bietet optimalen Patientenkomfort
- Veträgliche und verschreibungsfreie Silbersubstanz
- Schnelle (innerhalb 30 Minuten) und lang anhaltende antimikrobielle Wirkung (bis zu 7 Tagen)


## Anwendungshinweise

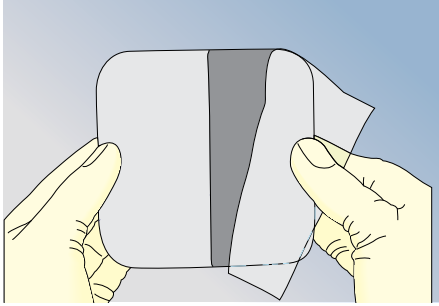

Reinigen Sie die Wunde und trocknen Sie die wundumgebende Haut. Entfernen Sie die Schutzfolie.

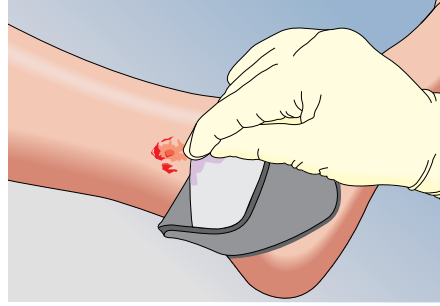

Mepilex® Ag sollte die Wunde mindestens zwei Zentimeter überlappen. Mit der haftenden Seite auf die Wunde applizieren. Verband nicht dehnen!

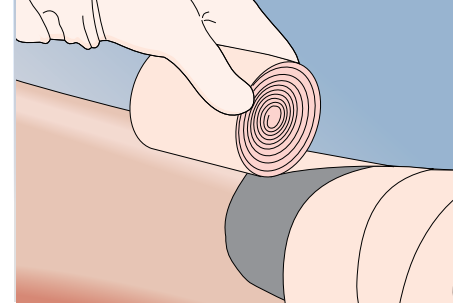

Falls notwendig, fixieren Sie den Verband zusätzlich, z.B. Tubifast.

## So funktioniert Mepilex® Ag

Mepilex® Ag ist ein antimikrobieller Schaumverband, der Wundexsudat effektiv absorbiert und ein feuchtes Wundmilieu aufrecht erhält. Innerhalb von 30 Minuten neutralisiert Mepilex® Ag pathogene Keime, wobei die Wirkung bis zu 7 Tage lang anhält. Durch die Verringerung der Mikroorganismen reduziert Mepilex® Ag auch die Geruchsbildung.

## Vorteile von Mepilex® Ag

- Minimiert Schmerz und Trauma während des Verbandwechsels
- sichere, verträgliche und verschreibungsfreie Silbersubstanz
- Kann unter Kompression verwendet werden
- Kann je nach Zustand der Wunde und Exsudatmenge mehrere Tage auf der Wunde belassen werden

## Bestellinformationen

### Home Care

Art.-Nr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung
28 70 50	10 x 10 cm	09 06 26 81	10
28 72 10	10 x 20 cm	02 22 72 39	5
28 73 10	15 x 15 cm	02 22 72 74	5
28 74 10	20 x 20 cm	02 23 09 68	5
28 75 10	20 x 50 cm	01 23 54 61	2

### Mepilex Heel Ag

38 81 00	13 x 20 cm	06 57 49 20	5
38 83 00	15 x 22 cm	06 57 49 43	5

Steril – einzeln verpackt

## Anwendungsgebiete

Mepilex® Ag ist für die Versorgung leicht bis mittelstark infizierte oder Wunden mit Infektionsrisiko geeignet, wie z.B. geeignet, wie z. B. Bein- und Fußgeschwüre, Druckgeschwüre und partielle Verbrennungen. Mepilex® Ag kann auch unter Kompressionsverbänden verwendet werden.

## Wichtige Hinweise!

- Mepilex® Ag darf nicht bei Patienten mit einer bekannten Überempfindlichkeit gegen Silber eingesetzt werden.
- Mepilex® Ag darf nicht während Strahlentherapien oder Bildgebungsverfahren wie z.B. Röntgen, Ultraschall, MR oder Diathermie verwendet werden.
- Mepilex® Ag darf nicht zusammen mit Oxidationsmitteln wie Hypochloridlösung oder Wasserstoffperoxyd verwendet werden.

## Klinik

Art.-Nr.	Größe	Stück/Packung
28 71 10	10 x 10 cm	5
28 72 10	10 x 20 cm	5
28 73 10	15 x 15 cm	5
28 74 10	20 x 20 cm	5
28 75 10	20 x 50 cm	2

### Mepilex Heel Ag

38 81 00	13 x 20 cm	5
38 83 00	15 x 22 cm	5

Steril – einzeln verpackt

Referenzen: 1. White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. 2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. 3. Taherinejad and Hamberg. Antimicrobial effect of a silver-containing foam dressing on a broad range of common wound pathogens. Poster publication, WUWHS 2008. 4. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-100.

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170. Mölnlycke Health Care, das Safetac® Logo und das Produkt Mepilex® Ag sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.

  
**Mölnlycke®**