




Mölnlycke®

# Mepilex® Border Flex

WITH SAFETAC® TECHNOLOGY

Apósito autoadhesivo de espuma  
cubierto de suave silicona

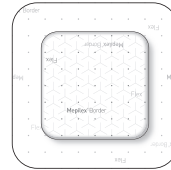

STERILE EO

CE 2797

Revised 2021-06

40294-40

PD-702932 rev. 00

Master PD-533177 rev. 05

Mölnlycke Health Care AB  
Gamlestadsvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden



No utilizar si el envase está dañado

MD

Producto sanitario



Sistema de barrera única estéril



Medida del apósito para cubrir la lesión



Para lesiones con poco exudado



Para lesiones con exudado moderado




Para lesiones con mucho exudado

## Mepilex® Border Flex <math>< 14 \times 15\text{cm}</math>



## Mepilex® Border Flex $\geq 14 \times 15\text{cm}$

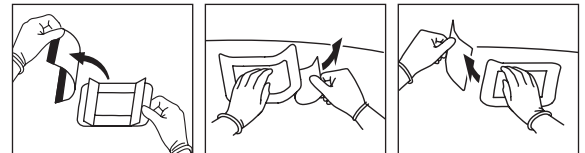

# Mepilex® Border Flex

Apósito autoadhesivo de espuma cubierto de suave silicona

## Descripción del producto

Mepilex Border Flex es un apósito cómodo, autoadhesivo y absorbente que mantiene un nivel de humedad óptimo en el lecho de la herida. La capa exterior impermeable protege la herida de la suciedad y las bacterias. El apósito cuenta con una capa de silicona Safetac®, tecnología adhesiva exclusiva, de contacto con la herida. Minimiza el dolor de los pacientes y el traumatismo en las heridas y la piel perilesional durante la retirada del apósito.

### El apósito Mepilex Border Flex está compuesto por:

- una capa de contacto con la herida formada por un adhesivo cubierto de suave silicona (Safetac) y un film
- un cuerpo de absorción flexible y absorbente con tres capas: una espuma, una capa expansiva de tejido no tejido y una capa de fibras superabsorbentes; el cuerpo de absorción está parcialmente perforado mediante la tecnología Flex
- un film exterior, transpirable pero impermeable, que ofrece una barrera contra los contaminantes externos

### Contenido del material del apósito:

silicona, poliuretano, poliacrilato, algodón, viscosa, poliéster y poliolefina.

## Indicaciones de uso

Mepilex Border Flex puede utilizarse en úlceras por presión y úlceras varicosas.

## Precauciones

- No lo utilice en pacientes con hipersensibilidad diagnosticada a los apósitos o sus componentes.
- No utilice este apósito junto con agentes oxidantes como soluciones de hipoclorito o peróxido de hidrógeno.
- Si observa signos de infección, como fiebre, enrojecimiento, calentamiento o hinchazón de la herida o la piel perilesional, consulte a un profesional sanitario para que le indique un tratamiento adecuado.
- No reutilice el apósito. En caso de reutilización, puede empeorar el rendimiento del producto y pueden producirse casos de contaminación cruzada.
- Estéril. No lo utilice si la barrera estéril está dañada o abierta antes de su uso. No lo esterilice de nuevo.

## Instrucciones de uso

Mepilex Border Flex puede ser utilizado por cualquier persona bajo la supervisión de profesionales sanitarios

1. Lave la herida según la práctica clínica.
2. Seque bien la piel perilesional.
3. Seleccione un tamaño / una forma de apósito adecuado/a. Cuando proceda, elija una forma de apósito adecuada para la cavidad anatómica específica. El cuerpo de absorción deberá cubrir al menos 1-2 cm del borde de la piel perilesional seca para proteger la piel perilesional de la maceración y fijar el apósito de forma segura.
4. Retire el film protector y coloque el lado adhesivo sobre la herida.
5. Retire el resto de papeles protectores y alise el borde sobre la piel. No estire el producto.

Puede dejar el apósito Mepilex Border Flex sobre la herida hasta un máximo de 7 días, en función del estado de la herida y de la piel perilesional, o según las indicaciones del médico.

El apósito Mepilex Border Flex puede utilizarse bajo vendajes de compresión.

Debe desecharse respetando los procedimientos medioambientales locales.

## Otra información

El color de la espuma de poliuretano empleada en el producto puede volverse más amarillo si se expone a la luz, al aire y/o al calor. Este cambio de color no repercutirá en las propiedades del producto mientras se utilice antes de la fecha de caducidad.

Todo incidente grave que pueda producirse en relación con el uso de Mepilex Border Flex deberá ser notificado a Mölnlycke Health Care y a las autoridades locales competentes.

Mepilex® y Safetac® son marcas registradas de Mölnlycke Health Care AB.