

Exufiber®


Gelbildender Faserverband mit
Hydrolock® Technologie

Hohe Retentionsfähigkeit

- sichere Bindung von Exsudat, Blut und Bakterien
- kein Auslaufen und keine Mazerationen

PVA Fasertechnologie


- Exzellente Faserfestigkeit
- Entfernen des Verbandes in einem Stück möglich

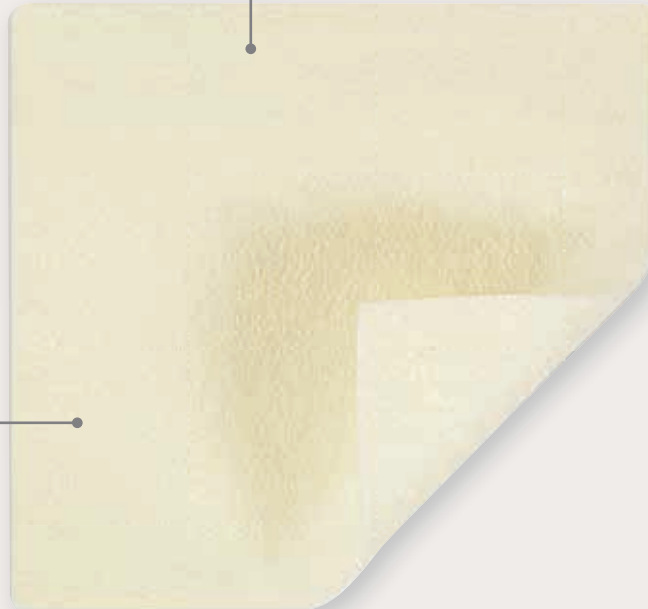


- Hohe Retentionskapazität vermeidet Mazerationen und das Auslaufen von Exsudat
- Stark absorbierend, zur sicheren Aufnahme von Exsudat, Blut und Bakterien

- Hohe Faserfestigkeit ermöglicht das Entfernen des Verbandes in einem Stück
- Auch unter Kompression einsetzbar

Anwendungshinweise

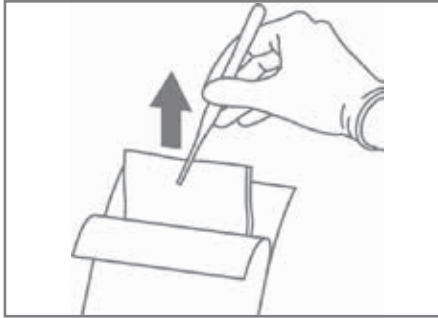


1. Reinigen Sie die Wunde gemäß dem medizinischen Standard. Trocknen Sie die wundumgebende Haut gründlich. Hautentnahmestellen: Gewebeentnahme und Blutstillung gemäß geltender Routine.

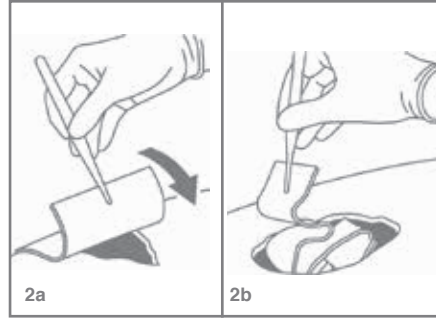

2a. Flache Wunden: Applizieren Sie einen trockenen Exufiber Verband auf die Wunde. Dieser sollte die gesamte Wunde bedecken und die wundumgebende Haut um mindestens 1-2 cm überlappen (5 cm Überlappung nötig bei großen Größen). Der Verband schrumpft, wenn er Wundflüssigkeit aufnimmt und anfängt, zu gelieren.

2b. Wundhöhlen: Füllen Sie Wundhöhlen locker mit dem Verband oder der Tamponade aus, um unnötigen Druck zu vermeiden.

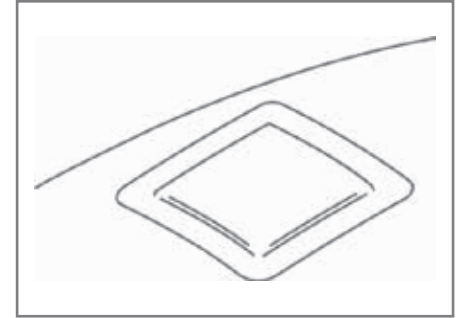

3. Decken Sie Exufiber mit einem geeigneten Sekundärverband ab und fixieren Sie diesen, falls nötig. Die Anwendung unter Kompression ist möglich, z.B. mit Mepilex Border Flex.

Funktionsweise von Exufiber

Exufiber ist ein gelbildender Faserverband mit Hydrolock® Technologie und besteht aus hoch absorbierenden Polyvinylalkohol-Fasern (PVA). In Kontakt mit Wundexsudat bildet Exufiber ein Gel, das die feuchte Wundheilung und den einfachen Verbandwechsel ermöglicht. Exufiber ermöglicht eine hohe Absorption und Retention und ist sowohl als Komresse, als auch als Tamponade erhältlich.

Vorteile von Exufiber

- Entfernen des Verbandes in einem Stück möglich → keine Rückstände
- Kein Auslaufen von Exsudat → Mazerationen werden vermieden
- Nimmt Exsudat, Blut und Bakterien auf und hält sie sicher im Verband
- Einsetzbar auch unter Kompression
- Kann bis zu 7 Tagen – auf Hautentnahmestellen bis zu 14 Tagen auf der Wunde verweilen

Vorsichtsmaßnahmen

Alle Wunden sollten regelmäßig inspiziert werden. Wenn der Verdacht einer Wundinfektion vorliegt, sollte die weitere Behandlung gemäß der durch den behandelnden Arzt festgelegten Richtlinien fortgeführt werden. Exufiber ist für trockene Wunden sowie vollflächige Verbrennungen nicht geeignet. Ist der Verband zu trocken oder schwer zu entfernen, feuchten sie ihn gemäß geltender Richtlinien an, bis er vollgesogen ist und einfach entfernt werden kann. Es kann mehrere Minuten dauern, bis Exufiber geliert. Entfernen Sie Exufiber durch sanftes Säubern/Spülen.

Anwendungsgebiete

Exufiber ist für eine Vielzahl oberflächlicher und tiefer exsudierender Wunden geeignet, wie z.B. für

- Bein- und Fußgeschwüre
- Dekubitalgeschwüre
- Oberflächliche Verbrennungen
- Chirurgische Wunden
- Hautentnahmestellen
- Palliative Wunden
- Hautläsionen und andere traumatische Wunden

Bestellinformationen

Home Care & Klinik

Art.-Nr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung
Kompressen			
60 33 00	5 x 5 cm	10 40 59 85	10
60 33 01	10 x 10 cm	10 40 59 91	10
60 33 02	15 x 15 cm	10 40 60 16	10
60 33 03	20 x 30 cm	10 40 60 97	5
60 33 05	4,5 x 10 cm	10 40 60 39	10
60 33 06	4,5 x 20 cm	10 40 60 68	10
60 33 07	4,5 x 30 cm	10 40 60 80	10
Tamponade			
60 33 08	2 x 45 cm	11 13 71 56	5

Steril – einzeln verpackt

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170. Mölnlycke Health Care, das Safetac® Logo und die Produkte Exufiber® sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.

Mölnlycke®