


Mepilex® Lite

Dünnere Schaumverband

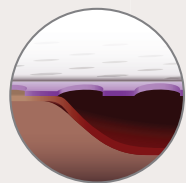

Safetac®- Beschichtung



Polyurethanschaum

- absorbiert Exsudat
- passt sich den Körperkonturen an
- strukturstabil

Polyurethanfilm

- wasserdampfdurchlässig
- wasserabweisend


Reduziert nachweislich die Schmerzen beim Verbandwechsel und die Schädigung der Haut^{1,5,6}

Die Safetac® Beschichtung haftet sanft an der intakten Haut und nicht an der Wunde^{1,5,6}



- Minimiert Trauma und Schmerz beim Verbandwechsel
- Passt sich gut an die Körperkonturen an
- als Hautschutz z.B. bei strahleninduzierten Hautschäden oder fragiler Haut einsetzbar


Anwendungshinweise

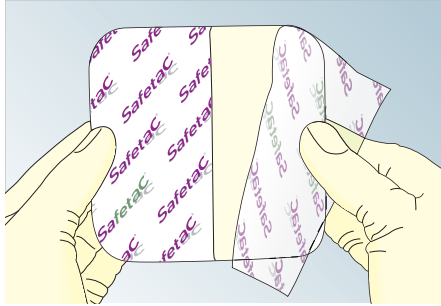

Reinigen Sie die Wunde gemäß dem medizinischen Standard und trocknen Sie gründlich die wundumgebende Haut. Entfernen Sie die Schutzfolie.



Applizieren Sie die haftende Seite auf die Wunde. Dehnen Sie den Verband nicht. Mepilex® Lite sollte die Wunde mindestens zwei Zentimeter überlappen.

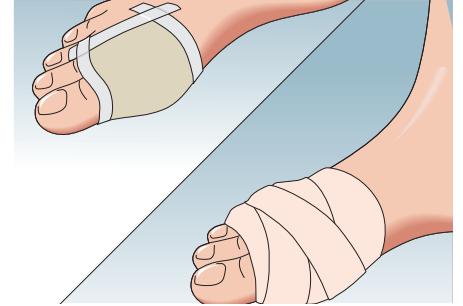

Falls notwendig, fixieren Sie Mepilex® Lite zusätzlich mit geeigneten Fixiermitteln, z. B. Tubifast®.

So funktioniert Mepilex® Lite

Mepilex® Lite ist ein hoch anpassungsfähiger Verband, der Wundexsudat effektiv absorbiert und das feuchte Wundmilieu aufrecht erhält. Dank Safetac® werden die Wundränder versiegelt, wodurch ein Auslaufen von Exsudat auf die wundumgebende Haut verhindert und das Mazerationsrisiko minimiert wird. Aufgrund der Safetac® Eigenschaften kann der Verband atraumatisch und schmerzarm gewechselt werden.

Vorteile von Mepilex® Lite

- atraumatisch zu Wunde und wundumgebender Haut
- minimiert das Mazerationsrisiko
- passt sich gut den Körperkonturen an
- gewährleistet einen hohen Tragekomfort
- erhält ein feuchtes Wundmilieu
- kann zugeschnitten werden



Anwendungsgebiete

Mepilex® Lite ist für eine Vielzahl von nicht bis leicht exsudierenden Wunden geeignet, wie z.B. Bein- und Fußgeschwüre, Druckgeschwüre, partielle Verbrennungen, Strahlenschäden oder Epidermolysis Bullosa. Außerdem lässt sich Mepilex® Lite als Schutz für gefährdete und fragile Haut einsetzen. Mepilex® Lite kann unter Kompression und in Kombination mit Gelen verwendet werden.

Wichtige Hinweise!

Mepilex® Lite sollte, je nach Größe der Wunde, mindestens 2 cm über den Wundrand auf die Wundumgebung appliziert werden. Im Falle von Anzeichen auf eine Infektion, ziehen Sie bitte medizinisches Fachpersonal zu Rate, um eine adäquate Behandlung der Infektion zu gewährleisten.

Bestellinformationen

Home Care

Art.-Nr.	Größe	PZN/Packung	Stück/Packung
28 40 10	7,5 x 8,5 cm	03 64 24 43	5
28 41 10	12,5 x 12,5 cm	03 64 27 27	5
28 43 10	17,5 x 17,5 cm	03 64 27 79	5
28 45 00	20 x 50 cm	09 89 16 96	4

Steril – einzeln verpackt

Klinik

Art.-Nr.	Größe	Stück/Packung
28 40 00	6 x 8,5 cm	5
28 41 00	10 x 10 cm	5
28 43 00	15 x 15 cm	5
28 45 00	20 x 50 cm	4

Steril – einzeln verpackt

Referenzen: 1. White R., A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK 2008; Vol 4, No 1. 2. Dykes PJ et al. Effects of adhesive dressings on the stratum corneum of the skin. J Wound Care 2001; 10(2):7-10. 3. Dykes PJ. The effect of adhesive dressing edges on cutaneous irritancy and skin barrier function. J Wound Care 2007, 16(3):97-100.

Erfahren Sie mehr unter www.molnlycke.de

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170. Mölnlycke Health Care, das Safetac® Logo und das Produkt Mepilex® Lite sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe. © 2018 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten.

