

# Mepore® IV

## Transparenter, atmungsaktiver Kanülenfixierverband

### Schutzfolie und Papierrahmen

- Ermöglichen eine einfache Applikation

### Polyurethanfolie

- Atmungsaktiv und elastisch
  - ermöglicht einen hohen Komfort für den Patienten
- Viren- und bakterienundurchlässig
  - sorgt für Schutz und Sicherheit
- Transparent
  - ermöglicht die äußere Kontrolle, ohne den Verband entfernen zu müssen

### Hautfreundlicher Polyacrylatkleber

- Gewährt eine sichere Fixierung


### Vliesstoffverstärkung

- Hohe Beanspruchung möglich




Mepore IV ist ein transparenter, selbstklebender Verband, der sich ideal für die Fixierung von intra-venösen Zugängen, wie z.B. zentralen Venenkathetern oder Venenverweilkanülen, eignet. Mepore IV ist einfach in der Anwendung.


## Anwendungshinweise

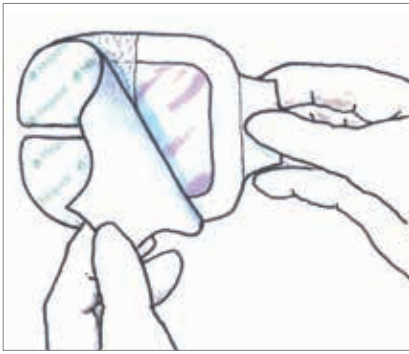

Öffnen Sie die Verpackung und entnehmen Sie den Verband. Halten Sie den Verband am Rand fest und entfernen Sie die Schutzfolie.

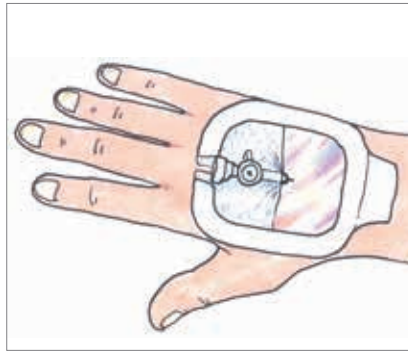

Prüfen Sie vor der Applikation, ob die Haut sauber und trocken ist. Positionieren Sie den Verband auf dem Katheter. Prüfen Sie, ob die Einführungsseite des Katheters von der Folie bedeckt ist.

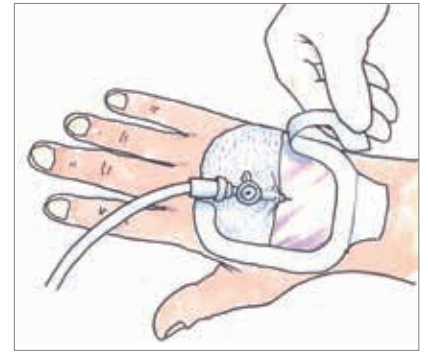

Entfernen Sie nun den Papierrahmen. Achten Sie darauf, dass der Verband eben aufliegt, um einen sicheren Halt zu gewährleisten. Entfernen Sie dann die Seitenränder. Den Verband nicht überdehnen.

## Eigenschaften von Mepore® IV

Mepore IV ermöglicht eine sichere Fixierung von intravenösen Zugängen. Der viren- und bakterienundurchlässige, transparente Polyurethanfilm bietet Schutz vor äußerer Kontamination. Dank der hohen Wasserdampfdurchlässigkeit wird überschüssige Feuchtigkeit von der Haut abgeleitet. Die verstärkte Vliesstoffschicht unterstützt die sichere Fixierung. Der Polyacrylatkleber ist sanft zur Haut und bietet gleichzeitig eine sichere Haftung. Die einfach zu entfernende Schutzfolie und der Papierrahmen ermöglichen eine einfache Applikation.

## Vorteile von Mepore® IV

- Zuverlässige und sichere Fixierung
- Hautfreundlicher Kleber
- Vliesstoffverstärkung für hohe Festigkeit
- Atmungsaktiv
- Transparenz ermöglicht die äußere Kontrolle
- Passt sich einfach den Körperkonturen an
- Bakterien- und virenundurchlässige Polyurethanfolie
- Flüssigkeitsundurchlässig
- Einfache Handhabung, auch beim Tragen von Handschuhen

## Anwendungsgebiete

Mepore IV wird zur Fixierung von intravenösen Zugängen eingesetzt, wie z.B. bei:

- zentralen Venenkathetern
- Venenverweilkanülen

## Hinweis

Lebensunterstützende, medizinische Materialien sollten nicht mit Mepore IV fixiert werden. Mepore IV ersetzt nicht Wundnähte oder andere primäre Wundverschlussverfahren.

## Bestellinformationen

### Home Care & Klinik

Art.-Nr.	Größe	PZN/ Packung	Stück/ Packung	Stück/ Karton
27 40 00	5,5 x 5 cm	02 38 10 35	100	600
27 42 00	8 x 9 cm	02 38 12 71	70	210
27 44 00	10 x 11 cm	02 38 12 94	70	210

Steril – einzeln verpackt

Erfahren Sie mehr unter [www.molnlycke.de](http://www.molnlycke.de)

Mölnlycke Health Care GmbH, Grafenberger Allee 297, 40237 Düsseldorf, Tel +49 211 920 88 0, Fax +49 211 920 88 170. Mölnlycke® und das Produkt Mepore® IV sowie die entsprechenden Logos sind weltweit eingetragene Marken eines oder mehrerer Mitglieder der Mölnlycke Health Care Unternehmensgruppe.  
© 2019 Mölnlycke Health Care AB. Alle Rechte vorbehalten. DWC0065

  
**Mölnlycke®**