

BARRIER® Trousse de laparoscopie bariatrique



- La taille et la forme de ce champ et de son ouverture répondent aux exigences de la chirurgie bariatrique
- Bande adhésive perfectionnée pour un meilleur contrôle de l'infection et un confort amélioré
- Selon les préférences du chirurgien, deux modèles sont disponibles pour plus de flexibilité: position dorsale ou de lithotomie
- Passe-tubulaires et supports intégrés pour une manipulation optimale des tubes
- Simple pliage et dépliage en trois étapes réalisables par une seule personne et conçu pour un emploi aseptique

Instructions sur l'utilisation du champ



1. Retirez le papier protecteur. Placez le champ au milieu du patient (voir pictogramme).



2. Dépliez le champ vers les côtés, d'abord vers vous.



3. Dépliez le champ vers les pieds du patient.



4. Voir pictogramme pied pour dépliage en position lithotomie. Prenez les coins et dépliez le champ sur les étriers, de façon identique des deux côtés.



5. Dépliez la partie supérieure du champ au-dessus de l'arceau d'anesthésie.



6. Le dépliage est terminé. Utilisez les passe-tubulures et les supports pour une meilleure manipulation des tubes.

N° de réf.	Description	Disp/ Trp
61450	Trousse de laparoscopie bariatrique	5/10
	1 housse de mayo 79×145cm	
	4 cellduk 19×25cm	
	1 OP-tape 9×49cm	
	2 passe-tubulures 2,5×30cm	
	1 housse de caméra 12×240cm	
	2 poches à instruments 25×40cm	
	1 champ de laparoscopie 280/230/270×330cm, ouverture 32×42cm avec jambières	
	1 champ de table 150×190cm	

N° de réf.	Composant des troussees composites Mölnlycke®
70550	Champ de laparoscopie 280/230/270×330cm, ouverture 32×42cm avec jambières
70551	Champ de laparoscopie 280/230/200×430cm, ouverture 30×40cm sans jambières
975880	Poche à instruments 25×40cm

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.molnlycke.be

Mölnlycke Health Care SA, Berchemstadionstraat 72, boîte 2, B-2600 Berchem, Belgique
Tél. 03 286 89 50. Fax 03 286 89 52

Le nom, le logo et la marque de Mölnlycke et BARRIER sont des marques déposées du groupe Mölnlycke Health Care.
© 2017 Mölnlycke Health Care. Tous droits réservés. (BFSUxxxx1709)