




Mölnlycke® Exufiber®

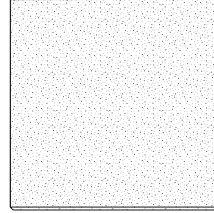

STERILE EO


CE 2797

Revised 2021-04

327306-02


PD-566150 rev. 01

Manufacturer

 Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadsvägen 3C, Box 13080, SE-402 52 Göteborg, Sweden


Master PD-541100 rev. 05

 Un solo uso  Vea instrucciones de uso


 No utilizar si el envase está dañado


MD Producto sanitario

 Sistema de barrera única estéril

 Para lesiones con poco exudado

 Para lesiones con exudado moderado

 Para lesiones con mucho exudado

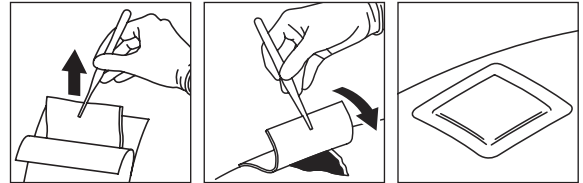

Mölnlycke Health Care S.L.,
Av. De la Vega 15, Edif. 3, 3a Planta
ES-28108 Alcobendas (Madrid)

Tel: +34 91 484 13 20

Customer Service Tel: 900 963 232

Exufiber®

Apósito de fibra gelificante

Descripción del producto

Exufiber es un apósito no tejido estéril compuesto por fibras de alcohol polivinílico altamente absorbente. En contacto con el exudado de la lesión, Exufiber se transforma en un gel, que favorece la cura en ambiente húmedo y una retirada sencilla al cambiar el apósito. Exufiber absorbe y retiene el exudado de la lesión.

Indicaciones de uso

Exufiber está indicado para úlceras por presión y úlceras venosas con un nivel de exudado entre moderado y alto.

Precauciones

- No lo utilice en pacientes con hipersensibilidad diagnosticada a los apósitos o sus materiales.
- Exufiber es de un solo uso y no debe reutilizarse. La reutilización podría causar un deterioro del producto o una contaminación cruzada.
- Si la infección aumenta durante el uso del apósito, debe iniciarse un tratamiento médico siguiendo los protocolos clínicos locales. La infección no es una contraindicación para el uso de Exufiber.
- Exufiber no está indicado para lesiones secas.
- Estéril. No use el producto si el envoltorio interior está dañado o abierto antes de su uso. No lo esterilice de nuevo.
- No lo utilice si ha caducado. No se garantizan las propiedades del producto si se utiliza después de su fecha de caducidad.

Instrucciones de uso

Exufiber debe utilizarse siempre bajo la supervisión de un profesional sanitario cualificado.

Aplicación

Lesiones superficiales

Limpie la lesión con abundante solución salina o con agua, según la práctica clínica.

1. Seque bien la piel perilesional.
2. Elija el tamaño adecuado de apósito para cubrir toda la herida. Para obtener mejores resultados, Exufiber debe cubrir la piel perilesional seca en al menos 1-2 cm. El apósito se encogerá al absorber el fluido de la herida y transformarse en gel.
3. Aplique un apósito Exufiber seco en la lesión.
4. Fíjelo con un apósito secundario adecuado. La opción que debe elegir depende de la cantidad de exudado.
5. Se pueden usar terapia de compresión junto con Exufiber.

Lesiones profundas y cavitadas

Limpie la lesión con abundante solución salina o con agua, según la práctica clínica.

1. Seque bien la piel perilesional.
2. Introduzca el apósito sin presionar la lesión, para dejar espacio para que el apósito se hinche.
3. Cúbralo con un apósito secundario adecuado. La opción que debe elegir depende de la cantidad de exudado.
4. Fíjelo (o cúbralo) con una venda o un apósito adhesivo según convenga.

Cambio y retirada del apósito:

Cambie Exufiber cuando esté completamente saturado, si se aprecian indicios de fuga o según las indicaciones del médico. Exufiber se puede dejar colocado hasta 7 días, en función del estado de la lesión o según la práctica clínica.

1. Retire el apósito secundario.
2. Retire Exufiber, limpiándolo suavemente si fuera preciso. Las partes de Exufiber que no estén gelificadas, se humedecerán al entrar en contacto con el exudado.
3. Si el apósito se seca y es difícil retirarlo, debe humedecerse con solución salina o agua siguiendo la práctica clínica y dejar que se empape hasta que se levante con facilidad. Exufiber puede tardar varios minutos en transformarse en gel. Retire el apósito limpiándolo suavemente.
4. Debe desecharse respetando los procedimientos medioambientales locales.

Información adicional

Todo incidente grave que pueda producirse en relación con el uso de Exufiber deberá ser notificado a Mölnlycke Health Care y a las autoridades locales competentes.

Exufiber® es una marca registrada de Mölnlycke Health Care AB.