

Mepilex® XT

Mousse conformable avec technologie Safetac® pour tous les stades de guérison

Couche Safetac®


- Réduit la douleur et le traumatisme avant, pendant et après le remplacement des pansements^{3,4}
- N'adhère pas aux plaies humides, seulement à la peau sèche
- Scelle le pourtour de la plaie et réduit le risque de macération⁶

Pellicule externe en polyuréthane

- Perméable à l'air
- Imperméable à l'eau
- Barrière contre les virus et les bactéries → 25nm⁸

Coussin de mousse polyuréthane avec canaux de drainage

- Capacité renforcée d'absorption de l'exsudat
- Absorbe l'exsudat visqueux²
- Résiste bien à la compression^{1,2}
- Mousse conformable et flexible avec motif

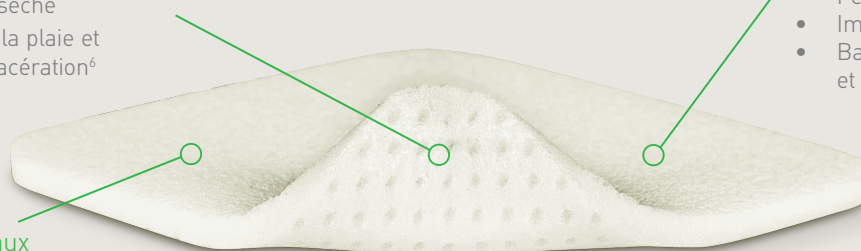

Safetac®
TECHNOLOGIE

- Absorbe efficacement une plus grande variété d'exsudats^{1,2} - absorbe l'exsudat visqueux²
- Ne cause aucun traumatisme à la plaie et à la peau péri-lésionnelle³ - réduit les interruptions à la plaie
- Moins douloureux lors des changements de pansement⁴ - réduit le stress des patients⁵
- Absorption renforcée de l'exsudat¹ - réduit le risque de fuite et de macération⁶
- Excellente conformité⁷ - Favorise le confort du patient pendant le port

Choix éprouvé pour un meilleur résultat

Safetac*, lancé par Mölnlycke, dépasse les attentes. Reconnus pour aider à optimiser la guérison des plaies, voire même prévenir les blessures, les pansements avec Safetac représentent le choix sûr pour les patients et la norme supérieure en soins des plaies.

En fait, de nombreuses données confirment les avantages cliniques et économiques des pansements avec Safetac, y compris Mepilex®, Mepitel®, Mepiform® et Mepitac®. À ce jour, ces pansements ont aidé des millions de patients partout dans le monde¹⁻³.


*Une technologie propriétaire unique exclusif à Mölnlycke Health Care

Safetac®
TECHNOLOGIE


Mepilex® XT


Mölnlycke®


Mode d'emploi

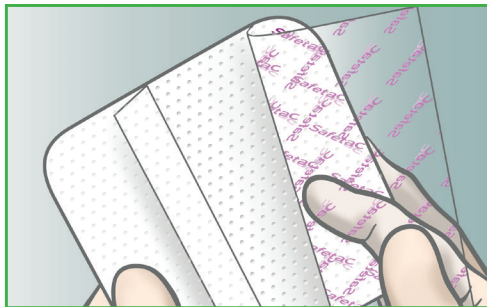

1. Nettoyer la plaie selon les procédures habituelles. Sécher soigneusement la peau périlésionnelle. Pour de meilleurs résultats, Mepilex® XT doit dépasser la peau périlésionnelle d'au moins 1 à 2 cm pour les dimensions allant jusqu'à 12,5 x 12,5 cm. Pour les plus grands formats, le pansement doit dépasser la peau périlésionnelle d'au moins 5 cm.

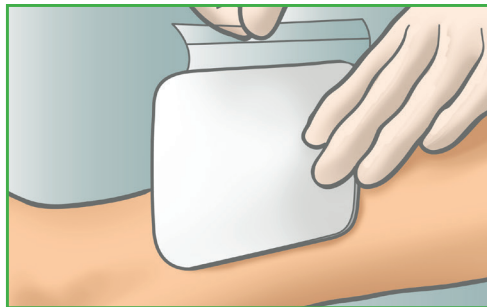

2. Retirer les feuillets protecteurs et appliquer la face adhésive du pansement sur la plaie. Ne pas étirer.

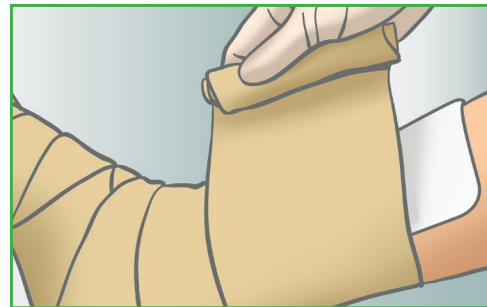

3. Au besoin, fixer Mepilex® XT avec un bandage ou un autre produit de fixation. Mepilex® XT peut demeurer en place plusieurs jours, selon l'état de la plaie et de la peau périlésionnelle.

Mode d'action de Mepilex® XT

Mepilex® XT est un pansement de mousse doux et extrêmement conforme avec canaux de drainage qui peuvent efficacement absorber une plus grande variété d'exsudats et maintenir la plaie hydratée.

La couche Safetac® scelle le pourtour de la plaie, prévient les fuites d'exsudat sur la peau péri-lésionnelle, réduisant ainsi le risque de macération. La couche Safetac® permet de remplacer le pansement sans dégrader la plaie ou la peau péri-lésionnelle, ni exposer le patient à des douleurs additionnelles.

Bienfaits de Mepilex® XT

- On peut l'utiliser à tous les stades de guérison
- Réduit la douleur et le traumatisme lors des changements de pansement
- Réduit le stress causé par la douleur lors des changements de pansement, de même que les délais de cicatrisation
- Réduit la macération et absorbe efficacement une plus grande variété d'exsudats, et garantit un milieu optimal pour la cicatrisation
- Reste en place et permet l'application « à mains libres » pour faciliter l'utilisation de pansements de compression ou de rétention⁶
- Peut être utilisé sous les pansements de compression
- Peut être découpé au besoin
- Favorise le confort du patient pendant le port
- Peut demeurer en place pendant plusieurs jours selon l'état de la plaie^{2,9}
- Peut être décollé et ajusté sans réduire les propriétés d'adhérence
- Non sensibilisant¹⁰

Sélection Mepilex® XT

No d'article	Format cm (pansement)	Pièces/boîte	Pièces/caisse
211015	5 x 5	5	40
211100	10 x 10	5	70
211200	10 x 20	5	45
211300	15 x 15	5	25
211400	20 x 20	5	20
211500	20 x 50	2	12

*Avis : Pour plus de détails sur les produits sous licence de Mölnlycke, y compris les indications et les précautions d'emploi, veuillez vous référer au site www.molnlycke.ca

Mölnlycke
1-800-494-5134
www.molnlycke.ca

Mölnlycke Health Care Canada, 2010 Winston Park Drive, Suite 100 Oakville, ON L6H 5R7. Téléphone: 905-829-1502
© 2023 Mölnlycke Health Care AB. Tous droits réservés.

Indications

Mepilex® XT convient à une plus grande variété de plaies exsudatives aiguës et chroniques à tous les stades de cicatrisation.

Précautions

- Ne pas utiliser chez les patients présentant une allergie connue au pansement ou à ses composants.
- En présence de signes clinique d'infection, consulter un professionnel des soins de santé pour traiter adéquatement l'infection.
- Ne pas utiliser Mepilex® XT avec des agents oxydants tels que les solutions d'hypochlorite ou du peroxyde d'hydrogène.



Références :

1. Fluid handling and retention properties Mepilex XT : Report no. 20130123-006 (SMTL). 2. Fluid handling and retention properties with Viscous test Fluid Mepilex XT, Report No. 20130104-004/ 20121012-004/20130104-004 (MHC). 3. White R. et al. Evidence for atraumatic soft silicone wound dressing use. Wounds UK, 2005. 4. White R. A Multinational survey of the assessment of pain when removing dressings. Wounds UK, 2008. 5. Upton D. et al. The Impact of Atraumatic Vs Conventional Dressings on Pain and Stress in Patients with Chronic Wounds. Journal of Wound Care, 2012. 6. Wiberg A.B. et al. Preventing maceration with a soft silicone dressing: in-vitro evaluations. Poster presented at the 3rd Congress of the WUWHS, Toronto, Canada, 2008. 7. Meuleneire F and Fostier A. Local treatment of heel pressure ulcers with a silicone foam dressing. Poster presentation. WUWHS, 2008. 8. External Test Lab Report no. 413098 (Nelson Laboratories). 9. Eager CA. Comparison of two foams through the measurement of healing time, frequency of dressing changes and peri wound status. Poster presentation. Advanced Wound Care and Medical Research Forum on Wound Repair, 2001. 10. Biocompatibility Evaluation, Filed in MHC.


Mölnlycke®
CFWC00962303