





Mölnlycke®

Mextra® Superabsorbant

Pansement superabsorbant avec couche externe hydrophobe

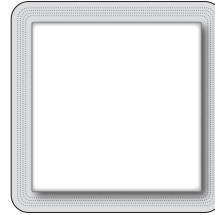

Manufactured in China for


 Mölnlycke Health Care AB
Gamlestadvägen 3C, Box 13080
SE-402 52 Göteborg, Sweden

www.molnlycke.com

Revised 2020-12

Master PD-477000 rev. 05

PD-602460 rev. 01

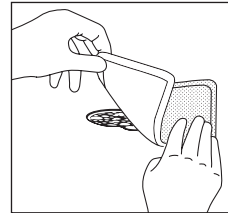

www.molnlycke.com/symbols



Système de barrière stérile unique



Usage unique



Voyez le mode d'emploi



Dispositif médical



Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé



Pour les plaies faiblement exsudatives



Pour les plaies modérément exsudatives



Pour les plaies hautement exsudatives

Mextra® Superabsorbant

Pansement superabsorbant avec couche externe hydrophobe

Description du produit

Mextra Superabsorbant est un pansement superabsorbant composé d'une couche externe hydrophobe en non-tissé, d'une couche centrale renfermant des particules superabsorbantes et d'une couche en non-tissé côté plaie. Mextra Superabsorbant absorbe les exsudats à travers la couche en contact avec la plaie puis les retient au niveau de la couche centrale afin de réduire le risque de macération. La couche externe hydrophobe non tissée agit comme une barrière et empêche les fuites d'exsudats.

Mextra Superabsorbant est composé de :

- Une couche en non-tissé côté plaie
- Une couche absorbante contenant des particules superabsorbantes
- Une couche externe en non-tissé semi-perméable

Composition du pansement :

Polyoléfine, cellulose, polyester, polyacrylate

Indications

Mextra Superabsorbant est indiqué pour les plaies modérément à fortement exsudatives.

Précautions d'emploi

- Ne pas utiliser le pansement Mextra Superabsorbant chez des patients et/ou des utilisateurs présentant une hypersensibilité connue aux composants du produit.
- En présence de signes cliniques d'infection, par exemple en présence de fièvre ou si la plaie ou la peau périlésionnelle devient rouge, chaude ou gonflée, consulter un professionnel de santé qui prescrira un traitement adapté.
- Stérile. Ne pas utiliser si l'emballage intérieur (barrière stérile) est ouvert ou endommagé. Ne pas restériliser.
- Ne pas réutiliser. S'il est réutilisé, le produit peut perdre de son efficacité et une contamination croisée peut survenir.
- Ne pas utiliser Mextra Superabsorbant dans des plaies cavitaires.
- Ne pas couper le pansement Mextra Superabsorbant.

Mode d'emploi

Mextra Superabsorbant peut être utilisé par des particuliers sous la supervision de professionnels de santé.

Lorsqu'une forte capacité d'absorption est nécessaire, Mextra Superabsorbant peut être utilisé comme pansement primaire directement sur la plaie ou comme pansement secondaire.

Mextra Superabsorbant peut être utilisé sous compression en cas d'ulcère veineux de jambe.

1. Nettoyer la plaie selon le protocole de soins en vigueur.
2. Choisir une taille de pansement de sorte que la compresse recouvre la plaie d'au moins 2 cm. Ne pas couper le produit.
3. Appliquer Mextra Superabsorbant directement sur la zone de la plaie ou comme pansement secondaire sur un pansement transférant l'exsudat. Le produit doit être placé avec le côté blanc du produit face à la plaie et le côté arrière bleu orienté vers le haut.
4. Fixer le pansement avec un bandage ou une bande adhésive par exemple.

Mextra Superabsorbant doit être renouvelé en fonction de l'état clinique de la plaie ou à saturation. Si l'état de la plaie se dégrade, cesser les applications et consulter un professionnel de santé. La durée d'utilisation maximale de chaque pansement est de 7 jours.

L'élimination doit être effectuée conformément aux normes environnementales locales.

Informations complémentaires

En cas d'incident grave dans le cadre de l'utilisation du dispositif Mextra Superabsorbant, il doit être signalé à Mölnlycke Health Care ainsi qu'aux autorités locales compétentes.

Mextra® est une marque déposée de Mölnlycke Health Care AB.